


サービスサイト 操作マニュアル

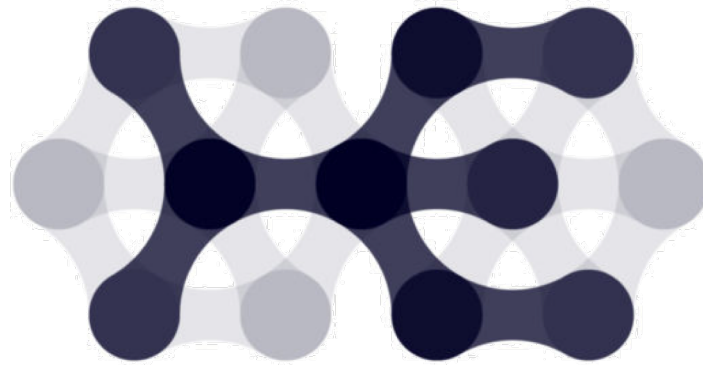


HoloEyes株式会社

201903



サービスサイト操作

本サービスの利用の際にはデータをご準備いただき、
アプリを作成した上で各ハードウェアにインストールすることをご利用いただけます

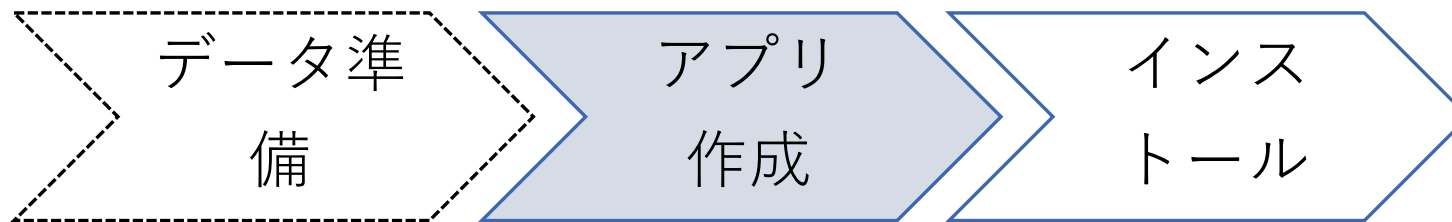

データを
ご準備ください

準備いただいたデー
タを使い
アプリを作成します

【手順】
操作方法は次章を
参照ください

作成したアプリを
各機器にインストー
ルします

【手順】
操作方法はハード
ウェアによって異な
ります。別途ご用意
しておりますマニユ
アルを参照ください



サービスサイト操作(1/3)

1. サイト (https://xr.holoeyes.jp/) からログインをし、「3Dモデルデータ」をクリックします

2. 「新規作成」ボタンをクリックします

3. 作成するデータの情報を入力して「登録」ボタンをクリックします



サービスサイト操作(2/3)

4.ポリゴンデータ「追加」ボタンをクリックすると、ポリゴンデータ追加画面が表示されます

一覧に戻る 削除

3Dモデルデータ **アップロード**

3Dモデルデータはまだ登録されていません。

詳細情報 **編集**

ステータス	● created
倍率	x1
備考	
タグ	

5.ポリゴンデータファイルの「ファイルを選択する」ボタンをクリックしてデータを追加し、「登録する」ボタンをクリックします

ポリゴンデータ可能サイズ50MB以下
(50MB以上のデータはエラーとなります。
お手数ですがポリゴンをリダクションしてください)

• 3Dモデルデータ追加

3Dモデルファイル 選択されていません

必須

モデル名 **必須**

アルファベット、数字、記号(-,_)または半角スペース15文字までで指定してください。

色

半透明かどうか 半透明

複数のSTLデータを組み合わせて作成する際には、それぞれに色をつけておくと識別しやすくなります

4



サービスサイト操作(3/3)

6.登録処理が終わると自動的に画面が切り替わります。使用する機器の「リクエストする」ボタンをクリックしてください
各機器のマニュアルは「？」ボタンから参照できます



7.アプリが完成すると登録しているメールアドレス宛にメールにて通知されます
(15分ほどかかります)
ダウンロード先のURLをクリックし
機器ごとに操作を行ってください

