



よくあるご質問 ～操作編～

そのほかのご質問ならびにご不明点等ございましたら
お気軽にご連絡ください

<お問い合わせ窓口>

info@holoeyes.jp

よくあるご質問：共通

共通

HoloLens

Vive

Windows
MR

Mirage
OculusGo



スマート
フォン
での活用

Q

本サービスをスマートフォンでも利用できますか？

A

操作自体をスマートフォンで行うことには現在対応しておりませんが、VR空間での動きをPC画面上で動画キャプチャしたデータ共有することで、スマートフォン上でも確認できます。

これにより、保存した内容を学会会場内などで参加者に体験してもらうことが可能です

スマート
フォン
での活用
(VIVE)

Q

Vive画面をPC側で見るためにするにはどうしたら良いですか？

A

SteamVRを押すと表示されるメニューから「ディスプレイミラー」を選択してください

よくあるご質問

共通

HoloLens

Vive

Windows
MR

Mirage
OculusGo



使用
PC

Q

HoloLensへのアプリインストールする際のPCは、**Macのブートキャンプ**でも大丈夫ですか？

A

Macのブートキャンプで対応可能です。

Xbox
コント
ローラー

Q

HoloLensを**Xbox**のコントローラーで操作できますか？

A

可能です。別途**HoloLens**操作マニュアルをご参照ください。

動画
取り出し

Q

Hololensの動画を取り出したいのですが、パソコンと連携させるにはどうしたらよいですか？

A

WinPCとUSB接続し、デバイスピータル経由で移してください。

参考：<https://qiita.com/miyaura/items/0f4cedb30101ab6a952b#hololens>での動きを共有したいなど PC側での操作（USBケーブル接続時）

- 1.HololensをUSBケーブルで接続する。
- 2.ブラウザから「127.0.0.1:10080」にアクセスする。
- 3.PINとユーザ名、パスワードの設定を行う(初回のみ)
- 4.ユーザ名、パスワードを入力しポータルにログインする。
- 5.左側メニューのMixed Reality Captureをひらく
6. Videos and photosの下に動画がリスト表示されるので、ディスクアイコンをクリックしてPC側にコピーできます。

ちなみに、iPhoneでも録画ができます。 HoloCapture for HoloLens 600円です。

<https://itunes.apple.com/jp/app/holocapture/id1207743320?mt=8> ちなみに、HoloStreamというアプリもありますが、無料ですがストリーミング閲覧のみができ、録画するにはApp内課金があり、¥11,800があります。(HoloStream Pro)

動画
取り出し

Q

Hololensの動画を取り出したいのですが、パソコンと連携させるにはどうしたらよいですか？

A

WinPCとUSB接続し、デバイスピータル経由で移してください。

参考：<https://qiita.com/miyaura/items/0f4cedb30101ab6a952b#hololens>での動きを共有したいなど PC側での操作（USBケーブル接続時）

- 1.HololensをUSBケーブルで接続する。
- 2.ブラウザから「127.0.0.1:10080」にアクセスする。
- 3.PINとユーザ名、パスワードの設定を行う(初回のみ)
- 4.ユーザ名、パスワードを入力しポータルにログインする。
- 5.左側メニューのMixed Reality Captureをひらく
6. Videos and photosの下に動画がリスト表示されるので、ディスクアイコンをクリックしてPC側にコピーできます。

ちなみに、iPhoneでも録画ができます。 HoloCapture for HoloLens 600円です。

<https://itunes.apple.com/jp/app/holocapture/id1207743320?mt=8> ちなみに、HoloStreamというアプリもありますが、無料ですがストリーミング閲覧のみができ、録画するにはApp内課金があり、¥11,800があります。(HoloStream Pro)



Q

サンプル
閲覧

A

HoloLensのサンプル動画を閲覧したいのですが、どうしたらよいですか？

1. Store版アプリのダウンロード

HoloLens内のStoreアプリで「HoloeyesXR」で検索いただいて、以下のアプリをインストール
<https://www.microsoft.com/ja-jp/p/holoeyesxr/9nxff7zmxwzl?ocid=badge&rtc=1&activetab=pivot:overviewtab>

2. 組み込み済みサンプルを閲覧する場合

アプリを起動すると、最初の画面で[Free Samples]というボタンがあるのでこれをタップするとアプリ内に組み込まれた6種類のサンプルを閲覧できます。

3. 追加サンプルをダウンロードする場合

2.とは別で、追加のサンプルをオンラインで取得することができます。

ブラウザで

<https://xr.holoeyes.jp/polylines/samples>

にアクセスいただくと、現在取得可能なサンプルの一覧が確認できます。

(次ページに続く)



Q

HoloLensのサンプル動画を閲覧したいのですが、どうしたらよいですか？

サンプル
閲覧

A

(前ページ続き)

これらのオンラインサンプルを利用するには、アプリの起動画面で[Add new assets]をタップしてください。キーパッドが表示されるので、サンプルの一覧で表示されていた6桁の数字を入力して[Enter]を押してください。

ダウンロードが始まります。

正常の取得できると、取得したサンプルがリストとして表示されるのでタップすると閲覧することができます。



サンプル
閲覧

Q

HoloLensのARマーカーはどこで入手できますか？サイズの指定はありますか？

A

お使いいただけるARマーカーは
以下のサイトのHoloLens説明部分のsharing-toolsよりダウンロードください。

<https://holoeyes.jp/topics/holoeyesxr-usrmanual/>

また、**ARマーカーのサイズは基本A4サイズを推奨しておりますが、
A4のPDFをB5に縮小して使うことはできます。**

ただし、**モデルの表示位置がずれる可能性**がございますので、
縮小時には確認の上ご利用ください。



Mirage
モニタ
投影

Q

MirageSoloの画面をモニターに投影したい場合はどうしたら良いです？

A

Chromecastと接続してください

1. 必要な機材

- ・MirageSolo本体
- ・Chromecast本体
- ・HDMI 接続できるモニター
- ・WiFi
- ・iPhone、Android端末、または、パソコン（Chromecastの設定に使用）

2. Chromecastの設定

モニターのHDMIにChromecast本体を挿して電源を接続してください。

詳細に関しては、以下のサイトのMirageSoloとChromecastとの接続についての箇所よりマニュアルをご参照ください

<https://holoeyes.jp/topics/holoeyesxr-usrmanual/>