

# Meta Quest セットアップ手順書 (Holoeyes Edu ヘッドセット版)

[Meta Quest のセットアップに関して](#)

[セットアップに必要な準備](#)

## [1. Meta Quest の初期セットアップ](#)

### [① Facebookアカウントの取得](#)

- [既にFacebookアカウントをお持ちの場合](#)
- [Facebookアカウントをお持ちでない場合](#)

### [② スマートフォンへ Oculusアプリのインストール](#)

### [③ Oculusアプリへ Facebookでログイン](#)

### [④ Meta Quest とスマートフォンのペアリング・初期セットアップ](#)

## [2. Holoeyes Edu アプリケーションのインストール](#)

## Meta Quest のセットアップに関して

2020年10月より、初めてMeta製品を使用する際には、Facebookアカウントでのログイン・セットアップが必要になりました。

以降、セットアップ時に用いた Facebookアカウントが利用停止になったという報告がインターネット上で散見されております。しかし、原因が明らかになっておらず、万一発生した場合には、Meta社公式サポートへご連絡していただくより他ございません。そのため、Meta Quest 2 / Meta Quest(以下、まとめて Meta Quest と表記する)を個人の Facebookアカウントでご利用いただく際は、ご自身のご判断に基づき BYOD使用としていただきますようお願いいたします。

※なお、個人の Facebookアカウントを使わずに、Facebookの「テストユーザー」(開発者向けアカウント)を用いてセットアップすることもできます。ただし、テストユーザーアカウントで Meta Quest をセットアップした場合には、Holoeyes アプリケーション以外のアプリを公式ストアからインストールすることはできません。その他、Holoeyes アプリケーションのご利用に関わること以外の機能制限などの確認は行っておりませんので、予めご了承ください。



製品を効率よく使うためのヒントです。

- Meta Quest は、Oculus Quest の新名称です。
- Meta Quest セットアップ手順書(Holoeyes MD/XR)は、[Holoeyes XR 取扱説明書](#)「2. アプリケーションインストール手順書」より「Meta Quest セットアップ手順書(Holoeyes MD/XR)」をご確認ください。

## セットアップに必要な準備

- Wi-Fi 環境
- Meta Quest
- iPhone (iOS 10以降)または Android™ (5.0 Lollipop以降)スマートフォン

# 1. Meta Quest の初期セットアップ

## ① Facebookアカウントの取得

■ 既にFacebookアカウントをお持ちの場合

② スマートフォンへの Oculusアプリのダウンロード へ進んでください。

■ Facebookアカウントをお持ちでない場合

以下の Facebookヘルプセンターの案内に沿って、アカウントを取得してください。

→ [Facebookアカウントを作成するにはどうすればよいですか](#)

## ② スマートフォンへ Oculusアプリのインストール

スマートフォンに Oculusアプリをインストールしてください。App Store (iPhone)または Google Playストア (Android™)で「Oculus」と検索いただくか、下記のリンクからもインストールできます。

App Store (iPhone):

<https://apps.apple.com/us/app/oculus/id1366478176>

Google Playストア (Android™):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight&hl=ja&gl=US>

## ③ Oculusアプリへ Facebookでログイン

スマートフォンの Oculusアプリを起動し、「Facebookでログイン」ボタンより、ログインを行ってください。

※スマートフォンの Facebookアプリやブラウザで Facebookにログインをしている場合、Oculusアプリでのログイン時にも Facebookアカウント情報は自動で入ります。もし別のアカウントでログインを行いたい場合には、一度 Facebookアプリまたはブラウザでログアウトをしてください。

## ④ Meta Quest とスマートフォンのペアリング・初期セットアップ

Meta Quest の電源ボタンを長押しし、起動してください。電源ボタンは、ヘッドセットの右側面にある横長の楕円形のボタンです。

続いて、スマートフォンの Oculusアプリに表示される手順に沿って、セットアップを進めてください。


## 2. Holoeyes Edu アプリケーションのインストール

Meta Quest を Wi-Fi に接続し、ホーム画面のストアアイコンを選択します(左下図)。検索窓に「holoeyes edu」※と入力し、ページ下部「App Lab(1件)」の「アプリを見る」を選択します(右下図)。

※ “holoeyes” と “edu” の間にスペース入力が必要です。英字は大文字・小文字どちらでも構いません。



アプリを選択し(左下図)、次に「詳細を見る」を選択します(右下図)。

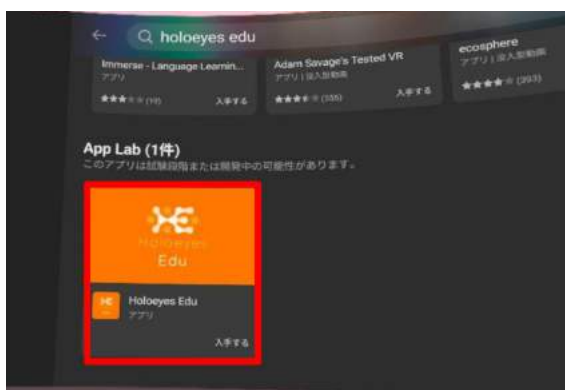

App Labでアプリを入手する際の注意事項が表示されます。お読みいただき「OK」を選択後(左下図)、「入手する」を選択してください(右下図)。



アプリケーションのインストールが完了すると、「スタート」ボタンが表示されます。「スタート」を選択し、アプリケーションを起動します。



## 参照

「App Lab」は Meta Quest 向けの公式ストア(Oculus Store)外アプリ配信システムです。「App Lab」ポリシーへの準拠とApp Labの審査を経て、Holoeyesアプリケーションを配信をしています。