

# Meta Quest セットアップ手順書 (Holoeyes Edu ヘッドセット版)

<b>Meta Quest のセットアップに関して</b>	<b>2</b>
セットアップに必要な準備	2
<b>1. Meta Quest のセットアップ</b>	<b>3</b>
1-1. Metaアカウントの作成 (Meta Quest を初めて利用する場合)	3
① スマートフォンへ Oculusアプリをインストールする	3
② Oculusアプリで Metaアカウントを作成する	3
②-1. Facebookアカウントで Metaアカウントを作成する	4
②-2. Instagramアカウントで Metaアカウントを作成する	5
②-3. メールアドレスで Metaアカウントを作成する	6
③ Meta Horizonプロフィールを作成する	8
④ Meta Quest とスマートフォンをペアリングし初期セットアップを行う	10
1-2. Metaアカウントの作成 (Facebookアカウントで Meta Quest を利用している場合)	11
① Facebookアカウントでログインする	11
② Metaアカウントを設定する	12
②-1. FacebookでMetaアカウントを設定する	13
②-2. メールアドレスでMetaアカウントを設定する	14
③ デバイスを設定する	15
④ Meta Horizonプロフィールを作成する	16
<b>2. Holoeyes Edu アプリケーションのインストール</b>	<b>17</b>

## Meta Quest のセットアップに関して

2022年8月より、初めてMeta製品を使用する際には、Metaアカウントの作成が必要になりました。以下のフロー図をご確認の上、対象の項目よりセットアップを進めてください。



### 注意

製品の損傷を予防し、正しい測定結果を得るために重要な事柄です。

- 既にFacebookアカウントでMeta Questを利用している場合は、必ずソフトウェアバージョンを最新にアップデートしてから、Metaアカウントを作成してください。古いバージョンのままMetaアカウントに移行すると、デバイスの初期化が必要になる可能性があります。

### 参照

製品を効率よく使うためのヒントです。

- Meta Quest は、Oculus Quest の新名称です。
- Holoeyes MD をご利用の方は、[Holoeyes MD 取扱説明書](#)「1. アプリケーションインストール手順書」より「Meta Quest セットアップ手順書(Holoeyes MD)」をご確認ください。
- Holoeyes XR をご利用の方は、[Holoeyes XR 取扱説明書](#)「2. アプリケーションインストール手順書」より「Meta Quest セットアップ手順書(Holoeyes XR)」をご確認ください。

## セットアップに必要な準備

- Wi-Fi 環境
- Meta Quest
- iPhone (iOS 10以降)または Android™ (5.0 Lollipop以降)スマートフォン

# 1. Meta Quest のセットアップ

## 1-1. Metaアカウントの作成 (Meta Quest を初めて利用する場合)

### ① スマートフォンへ Oculusアプリをインストールする

スマートフォンに Oculusアプリをインストールします。App Store (iPhone) または Google Playストア (Android™) で「Oculus」と検索するか、下記のリンクからインストールします。

- App Store (iPhone) :  
<https://apps.apple.com/us/app/oculus/id1366478176>
- Google Playストア (Android™) :  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight&hl=ja&gl=US>

### ② Oculusアプリで Metaアカウントを作成する

スマートフォンの Oculusアプリを起動します。

Facebookアカウント(②-1)、Instagramアカウント(②-2)、メールアドレス(②-3)のいずれかでMetaアカウントを作成します。



各種アカウントにスマートフォンでログインしている場合には、アカウント名が表示されます。



## ②-1. Facebookアカウントで Metaアカウントを作成する

1. 「Facebookでログイン」または「●●としてログイン」を選択します。



2. 「Facebookでログイン」を選択した場合は、Facebookへログインします。または、「●●としてログイン」を選択した場合は、スマートフォンでログインしている Facebookアカウント情報が表示されます。

「はい。次へ」を選択します。



3. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。



Facebookに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。




## ②-2. Instagramアカウントで Metaアカウントを作成する

1. 「Instagramでログイン」または「●●としてログイン」を選択します。



2. 「Instagramでログイン」を選択した場合は、Instagramへログインします。または、「●●としてログイン」を選択した場合は、スマートフォンでログインしている Instagramアカウント情報が表示されます。

「はい。次へ」を選択します。

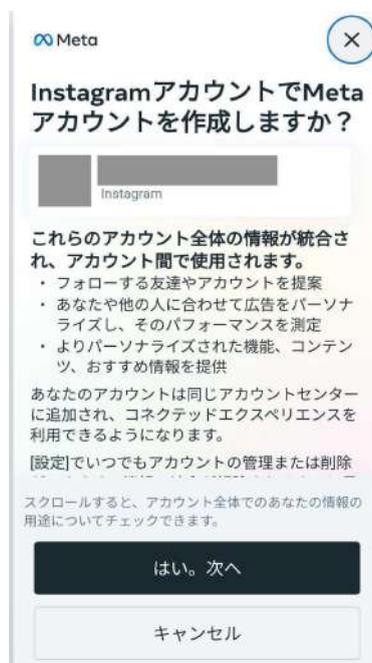

3. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。




Instagramに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



## ②-3. メールアドレスで Meta アカウントを作成する


1. 「メールアドレスでアカウントを設定」を選択します。
2. 既存アカウントの有無が表示されるので、「新しいアカウントを作成する」を選択します。

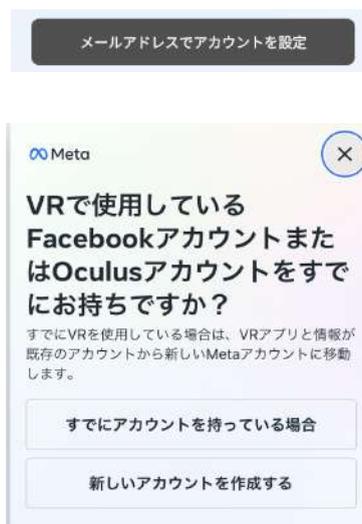

2. メールアドレス、名前、生年月日の入力が必要です。順番に入力し、「次へ」を選択します。

### 参照

- 既に Facebook アカウントや Oculus アカウントで利用しているメールアドレスを入力すると、「このメールアドレスは使用できません」というエラーが生じます。他のメールアドレス、または、既存のアカウントを利用して Meta アカウントを作成してください。
- 生年月日は、年齢制限未満でないかどうかの確認に利用されます。Meta アカウントの作成は、13 歳以上（スペインと韓国では 14 歳以上）で可能です。

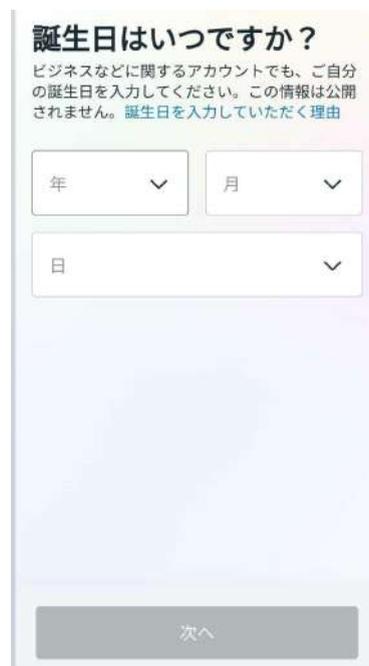

3. 最後にパスワードを設定し、「次へ」を選択します。



**パスワードを作成**

パスワードは8文字以上の英数字で作成し、他の人が推測できないものにしてください。

パスワード

次へ

4. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。



**Metaアカウントの作成を完了**

名前

メールアドレス

パスワード

誕生日

あなたのMetaアカウント情報は公開されていません。

Meta Quest製品のリリース、おすすめ、セールに関するプロモーションメールを受け取る。

アカウントを作成することで、Meta利用規約、利用規約の補足条項、Metaプライバシーポリシー、プライバシーポリシーの補足条項に同意するものとします。

アカウントを作成

戻る

### ③ Meta Horizonプロフィールを作成する



Meta Horizonプロフィールは、VRをはじめ、ウェブブラウザなどで使うソーシャルプロフィールです。自身固有のユーザーネーム、VRで他の利用者に表示されるHorizonネーム、プロフィール写真、アバターなどを選択できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。

1. 表示される手順に従ってHorizonネーム・ユーザーネームの設定、プロフィール写真の追加(スキップ可)をし、ログインします。

※ログイン後、Oculus 暗証番号及び決済情報(スキップ可)の入力を求められる場合があります。


※これ以降の手順(2～3)はスキップ可能な場合があります。



2. プライバシー設定を行います。「全員にオープン / 友人と家族 / 自分1人」のいずれかを選び、「確認」を選択します。設定内容を確認し、「同意して次に進む」を選択します。




3. 最後にアバターを作成し、プロフィールの設定は完了です。

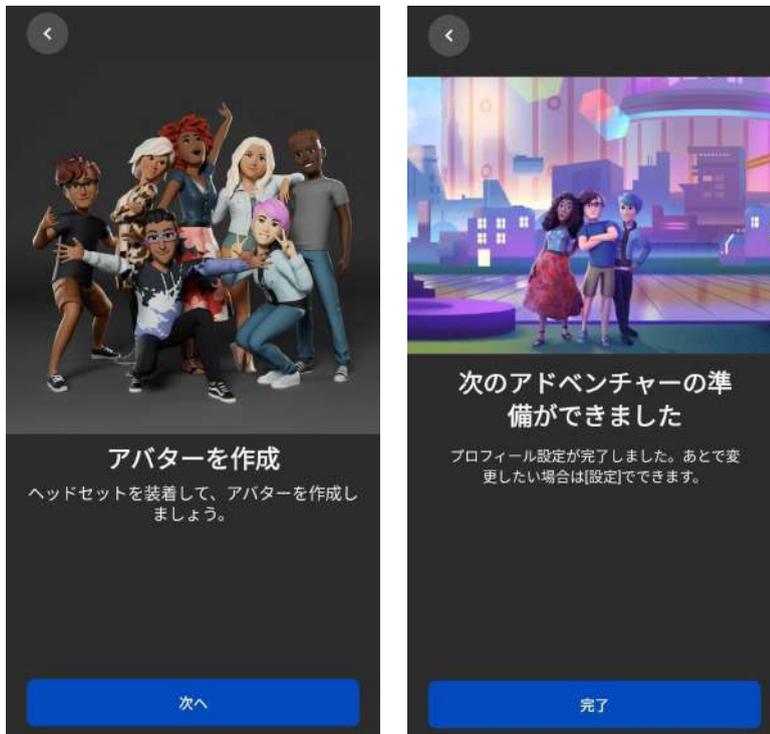

#### ④ Meta Quest とスマートフォンをペアリングし初期セットアップを行う

Meta Quest の電源ボタンを長押しして、Meta Quest を起動します。電源ボタンは、ヘッドセットの右側面にある横長の楕円形のボタンです。

続いて、スマートフォンの Oculusアプリに表示される手順に沿って、セットアップを進めます。

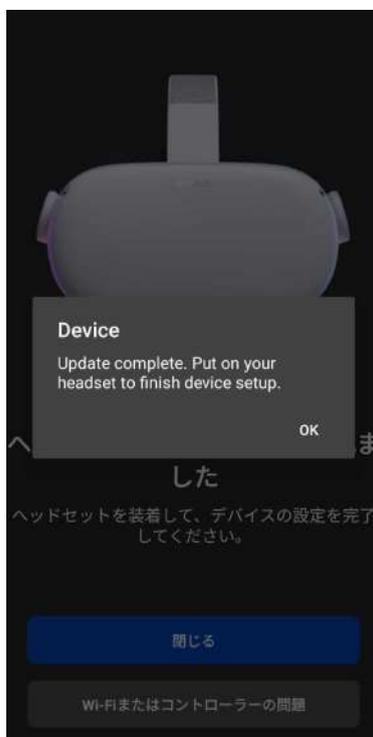

## 1-2. Metaアカウントの作成 (Facebookアカウントで Meta Quest を利用している場合)

### 注意

Facebookのテストユーザー (開発者向けアカウント / メールアドレスのドメイン: tfbnw.net) で Meta Quest を利用している場合は、ヘッドセット本体の初期化が必要です。

詳しくは、[info@holoeyes.jp](mailto:info@holoeyes.jp) までお問い合わせください。

### ① Facebookアカウントでログインする

1. <https://auth.meta.com/websetup/> にアクセスし、「Facebookでログイン」を選択します。



2. メールアドレスとパスワードを入力しログインします。



または、既にFacebookにログインしている場合は、アクセスを許可します。



## ② Metaアカウントを設定する

Metaアカウントを設定します。表示されているメールアドレスを確認し、「次へ」を選択します。

※このとき表示されているメールアドレスは、Oculusアカウントに登録されているメールアドレスです。



### **i** 注意

Meta Questのソフトウェアバージョンを最新にしていない場合、右図の画面が表示されます。古いバージョンのままMetaアカウントに移行をすると、デバイスの初期化が必要になる可能性があります。**必ず**、アップデートを行ってからMetaアカウントを設定してください。



続いて、FacebookでMetaアカウントを設定する(②-1)か、Facebookを使用せずにログインするか(②-2)を選択します。

Facebookアカウントとの連携を解除したい場合は「Facebookを使用せずにログイン」を選択してください。




### **💡** 参照

Facebookアカウントの追加や削除は、[アカウントセンター](#)でいつでも行えます。



## ②-1. FacebookでMetaアカウントを設定する

1. ログインしているアカウント情報が表示されるので、「次へ」を選択します。

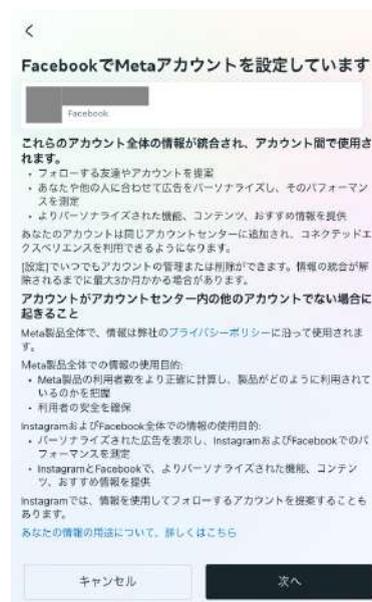

2. 表示されている内容を確認し、「アカウントの設定を完了」を選択します。



Facebookに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



## ②-2. メールアドレスでMetaアカウントを設定する

1. Metaアカウントのパスワードを作成します。「次へ」を選択すると、Oculusアカウントに登録されているメールアドレス宛に6桁の認証コードが送信されます。



2. メールで認証コードを確認し、入力します。



3. パスワードを設定し「次へ」を選択します。



4. 表示されている内容を確認し、「アカウントの設定を完了」を選択します。



### ③ デバイスを設定する

Metaアカウントの設定が完了すると、ヘッドセットにコードが表示されます。

<https://www.meta.com/device> にアクセスし、コードを入力後、「デバイスを接続」を選択します。

接続後ヘッドセット上で同期が行われ、ヘッドセットの再起動が始まります。



一定時間経過すると、ヘッドセットに表示されているコードは無効になります。その場合は、再度コードを生成してください。




## ④ Meta Horizonプロフィールを作成する



Meta Horizonプロフィールは、VRをはじめ、ウェブブラウザなどで使うソーシャルプロフィールです。自身固有のユーザーネーム、VRで他の利用者に表示されるHorizonネーム、プロフィール写真、アバターなどを選択できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。

1. Meta Horizonプロフィールとプライバシー設定を確認します。Horizonプロフィールの表示方法や名前の追加など、表示される手順に従って設定します。

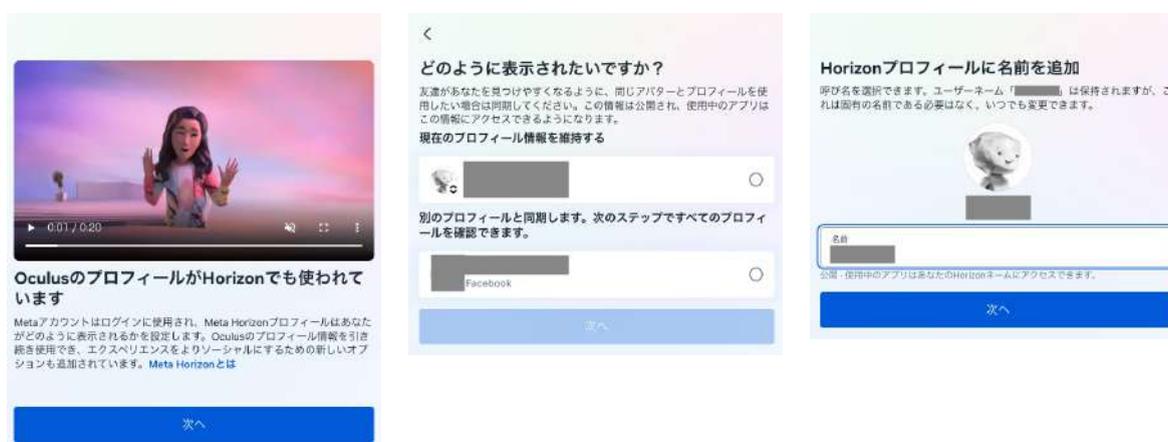

2. プライバシー設定の手順は、本手順書「1-1. Metaアカウントの作成 (Meta Quest を初めて利用する場合)」の「[③ Meta Horizonプロフィールを設定する](#)」と同様です。

## 2. Holoeyes Edu アプリケーションのインストール


Meta Quest を Wi-Fi に接続し、ホーム画面のストアアイコンを選択します(左下図)。

検索窓に「holoeyes edu」※と入力し、ページ下部「App Lab (1件)」の「アプリを見る」を選択します(右下図)。

※ “holoeyes” と “edu” の間にスペース入力が必要です。英字は大文字・小文字どちらでも構いません。



アプリを選択し(左下図)、次に「詳細を見る」を選択します(右下図)。

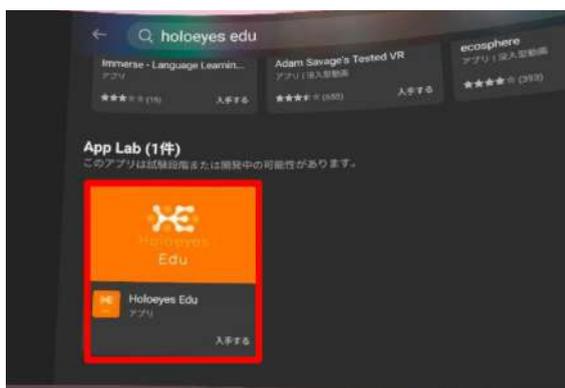

App Labでアプリを入手する際の注意事項が表示されます。確認の上「OK」を選択し(左下図)、続いて「入手する」を選択してください(右下図)。



アプリケーションのインストールが完了すると、「スタート」ボタンが表示されます。「スタート」を選択し、アプリケーションを起動します。



## 参照

「App Lab」は Meta Quest 向けの公式ストア(Oculus Store)外アプリ配信システムです。「App Lab」ポリシーへの準拠とApp Labの審査を経て、Holoeyesアプリケーションを配信をしています。