

Meta Quest セットアップ手順書 (Holoeyes XR)

Meta Quest のセットアップに関して	2
セットアップに必要な準備	3
1. Meta Quest のセットアップ	4
1-1. Metaアカウントの作成 (Meta Quest を初めて利用する場合)	4
① スマートフォンへ Meta Quest アプリをインストールする	4
② Meta Questアプリで Metaアカウントを作成する	4
②-1. Facebookアカウントで Metaアカウントを作成する	5
②-2. Instagramアカウントで Metaアカウントを作成する	6
②-3. メールアドレスで Metaアカウントを作成する	7
③ Meta Horizonプロフィールを作成する	9
④ Meta Quest とスマートフォンをペアリングし初期セットアップを行う	11
1-2. Metaアカウントの作成 (Facebookアカウントで Meta Quest を利用している場合)	12
① Facebookアカウントでログインする	12
② Metaアカウントを設定する	13
②-1. FacebookでMetaアカウントを設定する	14
②-2. メールアドレスでMetaアカウントを設定する	15
③ デバイスを設定する	16
④ Meta Horizonプロフィールを作成する	17
2. Holoeyes XR アプリケーションのインストール	18
3. Holoeyes アプリケーションの起動	20
改訂履歴	21

Meta Quest のセットアップに関して

2022年8月より、初めてMeta製品を使用する際には、Metaアカウントの作成が必要になりました。以下のフロー図をご確認の上、対象の項目よりセットアップを進めてください。



注意

製品の損傷を予防し、正しい測定結果を得るために重要な事柄です。

- 既にFacebookアカウントでMeta Quest を利用している場合は、必ずソフトウェアバージョンを最新にアップデートしてから、Metaアカウントを作成してください。古いバージョンのままMetaアカウントに移行すると、デバイスの初期化が必要になる可能性があります。

参照

製品を効率よく使うためのヒントです。

- Meta Quest は、Oculus Quest の新名称です。
- Holoeyes MD をご利用の方は、[Holoeyes MD 取扱説明書](#) 「1. アプリケーションインストール手順書」より「Meta Quest セットアップ手順書 (Holoeyes MD) 」をご確認ください。
- Holoeyes Edu(ヘッドセット版) をご利用の方は、[Holoeyes Edu 取扱説明書](#) 「1. アプリケーションインストール手順書」より「Meta Quest セットアップ手順書 (Holoeyes Edu ヘッドセット版) 」をご確認ください。

セットアップに必要な準備

- Wi-Fi 環境
- Meta Quest（付属ケーブル含む）
- iPhone (iOS 10以降)または Android™ (5.0 Lollipop以降)スマートフォン
- PC (Windows、macOS、Linuxのいずれか) ※

※ USBホスト(OTG)機能に対応しているAndroid™ スマートフォン及び当該 Android™ スマートフォンの端子と USB TYPE-C 端子を繋ぐケーブルをお持ちの場合には、PCは不要です。お手持ちのスマートフォンが USBホスト機能に対応しているかどうかは、「USB OTG チェッカーの互換性」というアプリをインストールすると確認できます。

1. Meta Quest のセットアップ

1-1. Metaアカウントの作成 (Meta Quest を初めて利用する場合)

① スマートフォンへ Meta Quest アプリをインストールする

スマートフォンに Meta Quest アプリをインストールします。App Store (iPhone) または Google Playストア (Android™) で「Meta」と検索するか、下記のリンクからインストールします。

- App Store (iPhone) :
<https://apps.apple.com/us/app/oculus/id1366478176>
- Google Playストア (Android™) :
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight&hl=ja&gl=US>

② Meta Questアプリで Metaアカウントを作成する

スマートフォンの Meta Questアプリを起動します。
Facebookアカウント(②-1)、Instagramアカウント(②-2)、
メールアドレス(②-3)のいずれかでMetaアカウントを作成しま
す。



参照

各種アカウントにスマートフォンでログインしている場合には、アカウント名が表示されます。



②-1. Facebookアカウントで Metaアカウントを作成する

1. 「Facebookでログイン」または「●●としてログイン」を選択します。



2. 「Facebookでログイン」を選択した場合は、Facebookへログインします。または、「●●としてログイン」を選択した場合は、スマートフォンでログインしている Facebookアカウント情報が表示されます。

「はい。次へ」を選択します。



3. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。



Facebookに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。




②-2. Instagramアカウントで Metaアカウントを作成する

1. 「Instagramでログイン」または「●●としてログイン」を選択します。



2. 「Instagramでログイン」を選択した場合は、Instagramへログインします。または、「●●としてログイン」を選択した場合は、スマートフォンでログインしている Instagramアカウント情報が表示されます。

「はい。次へ」を選択します。

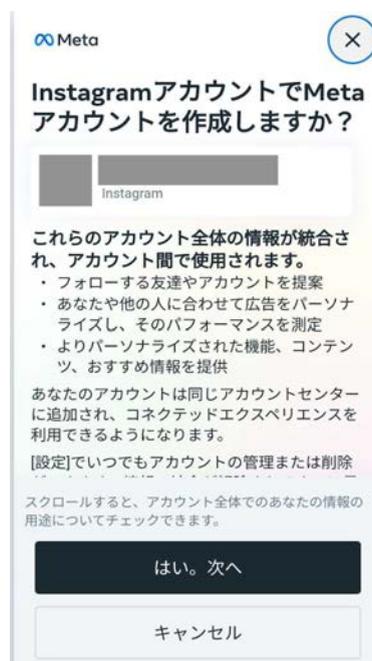

3. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。



Instagramに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



②-3. メールアドレスで Metaアカウントを作成する

1. 「メールアドレスでアカウントを設定」を選択します。




2. 既存アカウントの有無が表示されるので、「VRアプリを持っていない」を選択します。



3. メールアドレス、名前、生年月日の入力が必要です。順番に入力し、「次へ」を選択します。

参照

- 既にFacebookアカウントやOculusアカウントで利用しているメールアドレスを入力すると、「このメールアドレスは使用できません」というエラーが生じます。他のメールアドレス、または、既存のアカウントを利用してMetaアカウントを作成してください。
- 生年月日は、年齢制限未満でないかどうかの確認に利用されます。Metaアカウントの作成は、13歳以上（スペインと韓国では14歳以上）で可能です。

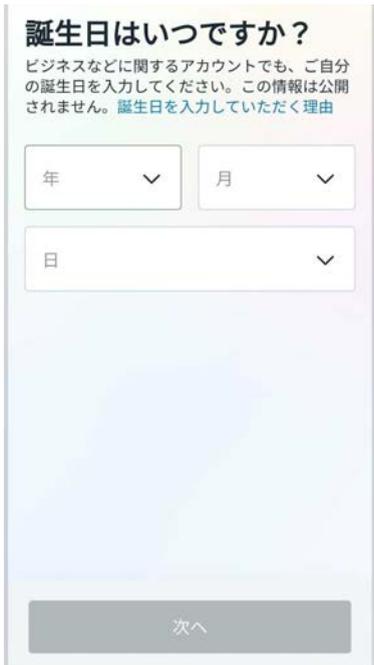

4. 最後にパスワードを設定し、「次へ」を選択します。



パスワードを作成

パスワードは8文字以上の英数字で作成し、他の人が推測できないものにしてください。

パスワード

次へ

5. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。



Metaアカウントの作成を完了

名前

メールアドレス

パスワード

誕生日

あなたのMetaアカウント情報は公開されていません。

Meta Quest製品のリリース、おすすめ、セールに関するプロモーションメールを受け取る。

アカウントを作成することで、Meta利用規約、利用規約の補足条項、Metaプライバシーポリシー、プライバシーポリシーの補足条項に同意するものとします。

アカウントを作成

戻る

③ Meta Horizonプロフィールを作成する



Meta Horizonプロフィールは、VRをはじめ、ウェブブラウザなどで使うソーシャルプロフィールです。自身固有のユーザーネーム、VRで他の利用者に表示されるHorizonネーム、プロフィール写真、アバターなどを選択できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。

1. 表示される手順に従ってHorizonネーム・ユーザーネームの設定、プロフィール写真の追加（スキップ可）をし、ログインします。

※ログイン後、Meta Quest 暗証番号及び決済情報(スキップ可)の入力を求められる場合があります。


※これ以降の手順(2～3)はスキップ可能な場合があります。



2. プライバシー設定を行います。「全員にオープン / 友人と家族 / 自分1人」のいずれかを選び、「確認」を選択します。設定内容を確認し、「同意して次に進む」を選択します。




3. 最後にアバターを作成し、プロフィールの設定は完了です。

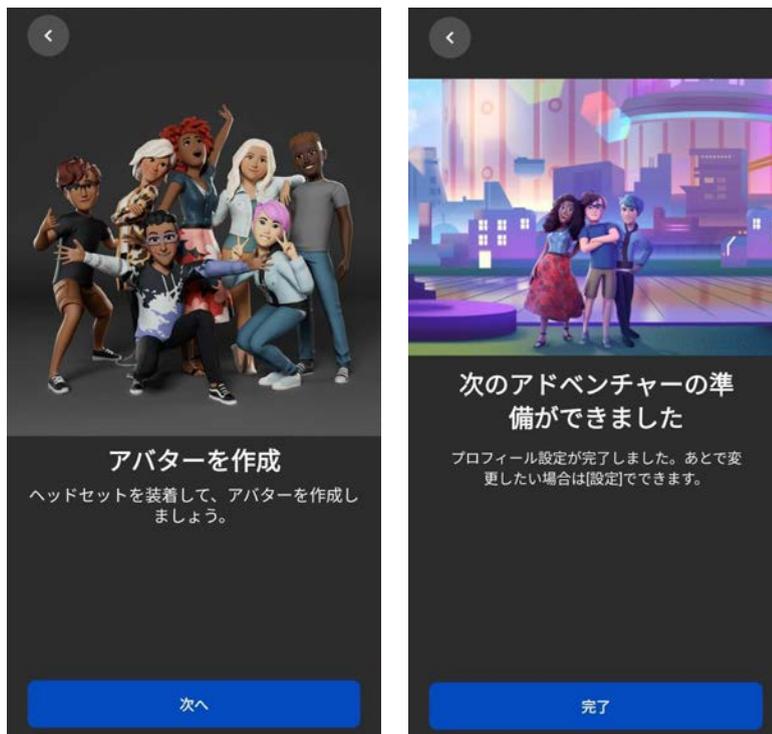

④ Meta Quest とスマートフォンをペアリングし初期セットアップを行う

Meta Quest の電源ボタンを長押しして、Meta Quest を起動します。電源ボタンは、ヘッドセットの右側面にある横長の楕円形のボタンです。

続いて、スマートフォンの Meta Quest アプリに表示される手順に沿って、セットアップを進めます。

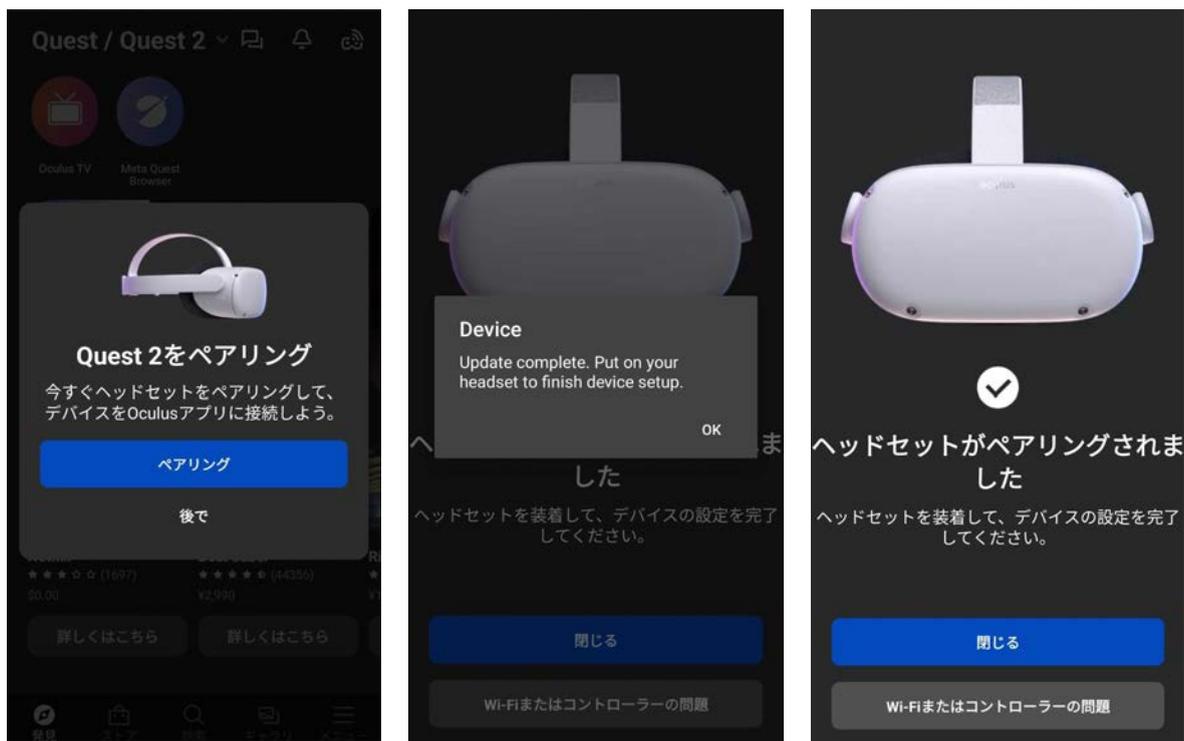

1-2. Metaアカウントの作成（Facebookアカウントで Meta Quest を利用している場合）

注意

Facebookのテストユーザー（開発者向けアカウント / メールアドレスのドメイン：tfbnw.net）で Meta Quest を利用している場合は、ヘッドセット本体の初期化が必要です。

詳しくは、info@holoeyes.jp までお問い合わせください。

① Facebookアカウントでログインする

1. <https://auth.meta.com/websetup/> にアクセスし、「Facebookでログイン」を選択します。



2. メールアドレスとパスワードを入力しログインします。



または、既にFacebookにログインしている場合は、アクセスを許可します。



② Metaアカウントを設定する

Metaアカウントを設定します。表示されているメールアドレスを確認し、「次へ」を選択します。

※このとき表示されているメールアドレスは、Oculusアカウントに登録されているメールアドレスです。



① 注意

Meta Questのソフトウェアバージョンを最新にしていな場合、右図の画面が表示されます。古いバージョンのままMetaアカウントに移行をすると、デバイスの初期化が必要になる可能性があります。**必ず**、アップデートを行ってからMetaアカウントを設定してください。



続いて、FacebookでMetaアカウントを設定する(②-1)か、Facebookを使用せずにログインするか(②-2)を選択します。Facebookアカウントとの連携を解除したい場合は「Facebookを使用せずにログイン」を選択してください。




④ 参照

Facebookアカウントの追加や削除は、[アカウントセンター](#)で行っても行えます。



②-1. FacebookでMetaアカウントを設定する

1. ログインしているアカウント情報が表示されるので、「次へ」を選択します。

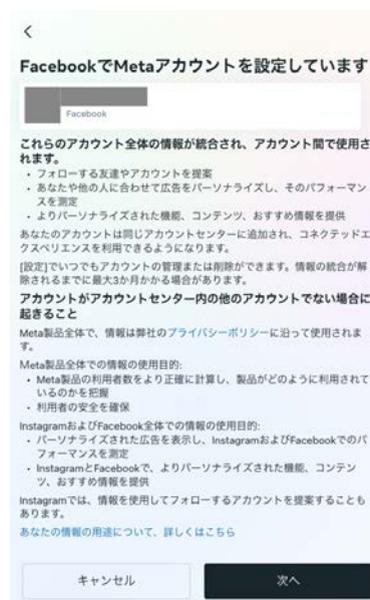

2. 表示されている内容を確認し、「アカウントの設定を完了」を選択します。



Facebookに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



②-2. メールアドレスでMetaアカウントを設定する

1. Metaアカウントのパスワードを作成します。「次へ」を選択すると、Meta アカウントに登録されているメールアドレス宛に6桁の認証コードが送信されます。



2. メールで認証コードを確認し、入力します。



3. パスワードを設定し「次へ」を選択します。



4. 表示されている内容を確認し、「アカウントの設定を完了」を選択します。



③ デバイスを設定する

Metaアカウントの設定が完了すると、ヘッドセットにコードが表示されます。

<https://www.meta.com/device> にアクセスし、コードを入力後、「デバイスを接続」を選択します。

接続後ヘッドセット上で同期が行われ、ヘッドセットの再起動が始まります。

参照

一定時間経過すると、ヘッドセットに表示されているコードは無効になります。その場合は、再度コードを生成してください。



④ Meta Horizonプロフィールを作成する



Meta Horizonプロフィールは、VRをはじめ、ウェブブラウザなどで使うソーシャルプロフィールです。自身固有のユーザーネーム、VRで他の利用者に表示されるHorizonネーム、プロフィール写真、アバターなどを選択できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。

1. Meta Horizonプロフィールとプライバシー設定を確認します。Horizonプロフィールの表示方法や名前の追加など、表示される手順に従って設定します。





2. プライバシー設定の手順は、本手順書「1-1. Metaアカウントの作成（Meta Quest を初めて利用する場合）」の「[③ Meta Horizonプロフィールを設定する](#)」と同様です。

2. Holoeyes XR アプリケーションのインストール

Meta Quest を Wi-Fi に接続し、ユニバーサルメニューからストアアイコンを選択します(左下図)。検索窓に「holoeyes xr」※と入力し、ページ下部「App Lab (1件)」の「入手する」を選択します(右下図)。

※ “holoeyes” と “xr” の間にスペース入力が必要です。英字は大文字・小文字どちらでも構いません。

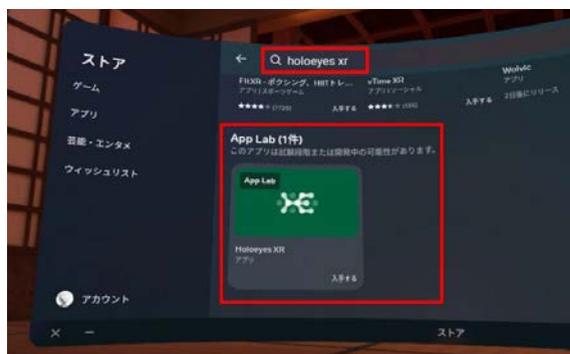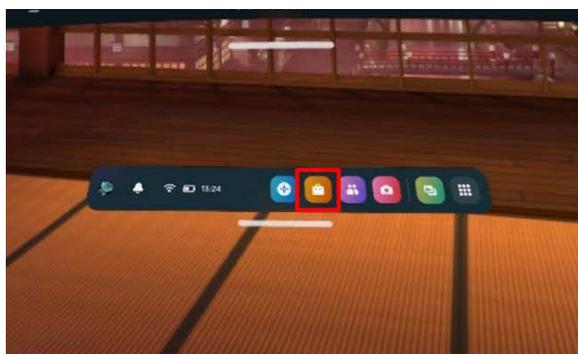

次に「詳細を見る」を選択します(左下図)。App Lab でアプリを入手する際の注意事項が表示されるので、確認の上、「OK」を選択します(右下図)。





次に「入手する」を選択します(左下図)。アプリケーションのインストールが完了すると、「スタート」ボタンが表示されます(右下図)。「スタート」を選択し、アプリケーションを起動します。



注意

Holoeyes XR Version.2.5 以前からご利用いただいている場合

- ヘッドセットにインストールしている既存のアプリをアンインストールしてから、アップデートを実行してください。
- SideQuest 経由でのインストール (Holoeyes XR Version.2.5 までのインストール方法) は、Holoeyes XR Version.2.6 以降は終了しています。SideQuest へアクセスいただいた場合でも、「DOWNLOAD APP (OCULUS)」を選択(左下図)すると、App Lab のインストールページへ遷移します(右下図)。

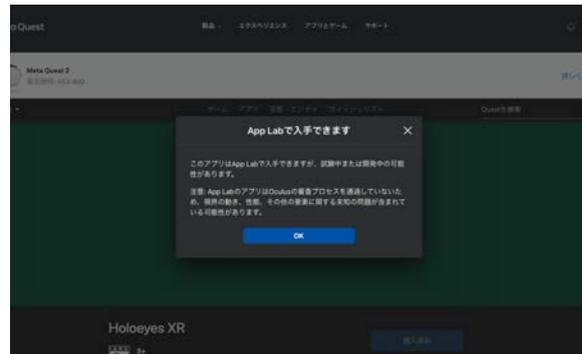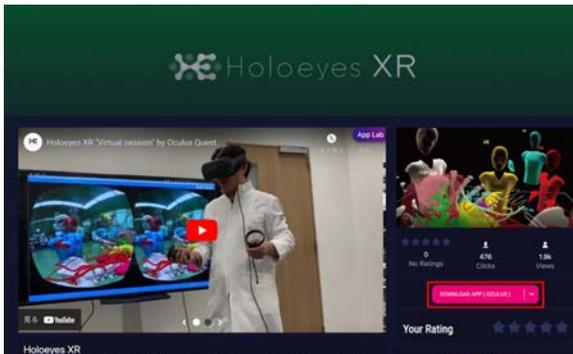


参照

App Lab は Meta Quest 向けの公式ストア (Oculus Store) 外アプリ配信システムです。App Lab ポリシーへの準拠と App Lab の審査を経て、Holoeyesアプリケーションを配信をしています。

3. Holoeyes アプリケーションの起動

Meta Quest のユニバーサルメニューからアプリケーションアイコンを選択します(左下図)。
右上のフィルターマークを選択し、続いて、右上のプルダウンリストから「すべて」を選択します
(右下図)。

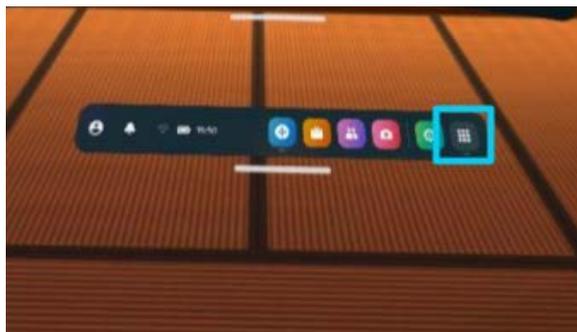

一覧に表示されている「Holoeyes XR」アプリケーションを選択し、起動します。



改訂履歴

日付	内容
2022年10月12日	Metaアカウントリリースに伴うMeta Questセットアップ手順書の仕様の修正
2023年3月17日	アプリケーションインストール手順及びスクリーンショット画面の変更