

VR / MRヘッドセット 準備とセットアップ

VR / MR ヘッドセットは、発売開始からの経過年数に応じて
メーカーサポートの終了が近づく可能性がありますので、ご注意ください。

VRヘッドセット購入に関して

- Meta Quest シリーズ (没入型 / 非透過型)



Meta Quest 2
31,900円 ~

日本発売日 2020.10.13



Meta Quest 3
74,800円 ~

日本発売日 2023.10.10



Meta Quest Pro
159,500円 ~

日本発売日 2022.10.25

【直接のご購入の場合 (最安)】

① 通販サイト

- ・ Meta 公式ストア : <https://www.meta.com/jp/quest/>
- ・ アマゾンジャパン

② 家電量販店 (お取り扱いのない機種もございます)

- ・ ビックカメラ、エディオン、コジマ、ソフマップ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ

【Holoeyes 販売パートナーからご購入の場合】

一部のHoloeyes 販売パートナーも取扱可能です。

VR / MR ヘッドセットは、発売開始からの経過年数に応じて
メーカーサポートの終了が近づく可能性がありますので、ご注意ください。

MRヘッドセット購入に関して

- HoloLens 2 (透過型)



日本発売日 2019.11.7

購入の場合

① Microsoft 公式サイト

<https://www.microsoft.com/ja-jp/hololens/buy>

本体価格 422,180円 (税・送料込)

② Microsoft 認定販売代理店

・大塚商会 など

<https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/microsoft/hololens/>

③ Holoeyes販売パートナー(代理店)

一部のHoloeyes 販売パートナーも取扱可能です。

レンタルの場合

横河レンタ・リース 株式会社

<https://www.yrl.com/mp/hololens/>

レンタル料金 月額

1~3カ月 60,000円

4~6ヶ月 45,000円

1カ月以下または6カ月以上のレンタルについては別途ご相談。

延長・解約も可能。

※ 横河レンタ・リース (株) HPより

Meta Questのセットアップについて

- Meta Questに加えて事前にスマートフォン端末とWi-Fi環境をご準備ください

Step1 : スマートフォンでの準備



- ① Meta Questモバイルアプリ (Meta Horizon) をインストール
- ② Metaアカウントの作成とアプリのサインイン

Step2 : Meta Quest でのセットアップ

VRゴーグル内で流れる動画内指示に従って進めます

Step3 : Meta Questとモバイルアプリのペアリング



Step4 : Holoeyes MD アプリケーションのインストール

Meta ストアから Holoeyes MD のアプリを検索



Meta Questのセットアップについて（開発者モード）

- Meta Questからの有線でのミラーリング(*1)、ガーディアンオフ(*2)に必要な設定です

*1 VRの映像をケーブルでつないで、PCにリアルタイムで表示すること

*2 VR空間での動ける範囲を設定する機能を無効にして、どこでも自由に動けるようにする設定

「PCで行う場合」* スマートフォン端末 Meta Horizon アプリからでもブラウザ経由で設定可能です

- ① <https://developer.oculus.com/manage/organizations/create> にアクセス
- ② Meta Questでログインしているアカウントと、同じアカウントでログインする
- ③ クレジットカード情報か、二段階認証を設定する
- ④ 組織名を入力する欄があるので、自由に組織名を入力する
- ⑤ 「理解しました」にチェックをいれ、「送信」をクリックする
- ⑥ Meta Horizon アプリで「開発者モード」のトグルをONにする (下記のStep1~4)



HoloLens 2のセットアップについて

- HoloLens 2に加えて事前にMicrosoftアカウントとWi-Fi環境をご準備ください

Step1 : Microsoftアカウントの準備

アカウントをお持ちでない場合は
下記のページよりアカウント作成を行います。

<https://account.microsoft.com/account?lang=ja-jp>

下記の3つのドメインが選択可能です。

@outlook.jp、@outlook.com、@hotmail.com

Step2 : HoloLens 2の準備


- ① 起動、装着
- ② Wi-Fi接続、案内に従ってセットアップ
- ③ Microsoft アカウントでサインイン → 設定完了

Step3 : Holoeyesアプリケーションのインストール

メニューパネルからMicrosoft Storeを選択しアプリを検索



Microsoft Store

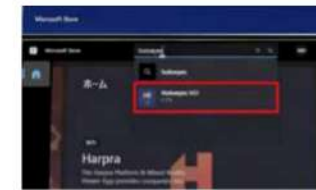

Holoeyes MDを検索して選択



インストール