

# **Apple Vision Pro セットアップ手順書**

<b>はじめに</b>	<b>2</b>
<b>Apple Vision Pro のセットアップ</b>	<b>3</b>
初期設定	3
1. Apple Account の作成	3
2. 本体のセットアップ	3
<b>Holoeyes MDアプリケーションのインストール</b>	<b>4</b>
App Storeからアプリをインストールする	4
<b>改訂履歴</b>	<b>5</b>

## はじめに


本手順書の一部には、手順の詳細が記載されたApple社のWebページのリンクを挿入しています。  
電源を入れる前に[Apple Vision Proの装着状態](#)を調整し、[バッテリーを充電](#)します。

### ① 注意

製品の損傷を予防し、正しい測定結果を得るために重要な事柄です。

バッテリーを保管する際、バッテリーケーブルはバッテリーの短手方向に巻いてください。

また、電源ケーブルの損傷を避けるため、ケーブルをバッテリーにきつく巻きすぎないでください。

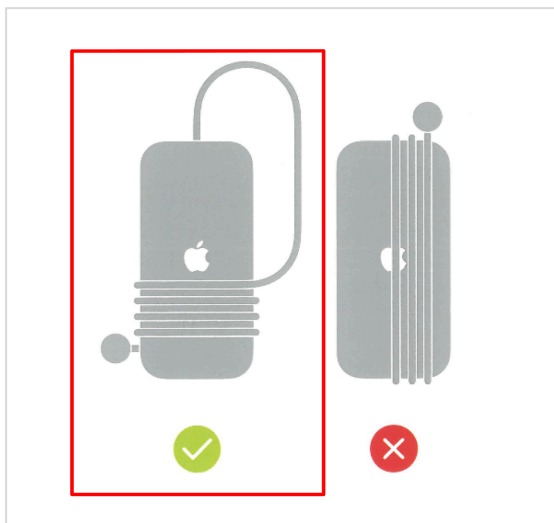

### 💡 参照

製品を効率よく使うためのヒントです。

- Apple Vision Pro は視線と手のジェスチャで操作します。[「Apple Vision Pro でジェスチャを使う」](#)を参照し、操作をしてください。また、セットアップ時に視線と手の設定を行いますが、いつでも設定をやり直すことができます。詳細は、[「Apple Vision Proで視線と手の設定をやり直す」](#)をご確認ください。
- Apple Vision Pro の電源を切らずに頭から取り外すと、電力を節約するためにディスプレイがオフになります。さらに、セキュリティのためにロックがかかり、スリープ状態になります。再度使用する際は、[「Apple Vision Proのスリープを解除する/ロックを解除する」](#)を参照し、スリープとロックを解除してください。

# Apple Vision Pro のセットアップ

## 初期設定

Apple Vision Pro のセットアップには、Apple Account 及び Wi-Fi 接続が必要です。  
Apple Account を既にお持ちの方は、[「2. 本体のセットアップ」](#)以降をご確認ください。

## 1. Apple Account の作成

[「新しいApple Accountの作成方法」](#)をご参照ください。



Apple製品でApple IDをご利用中の方は、Apple IDと同じメールアドレスまたは電話番号、パスワードでサインインできます。

## 2. 本体のセットアップ


Apple Vision Pro のセットアップを行います。

[「Apple Vision Proの電源を入れて設定する」](#)を参照し、設定を完了してください。


# Holoeyes MDアプリケーションのインストール

## App Storeからアプリをインストールする


1. [「Apple Vision ProのApp Storeでアプリを入手する」](#)を参照し、App Storeを開きます。

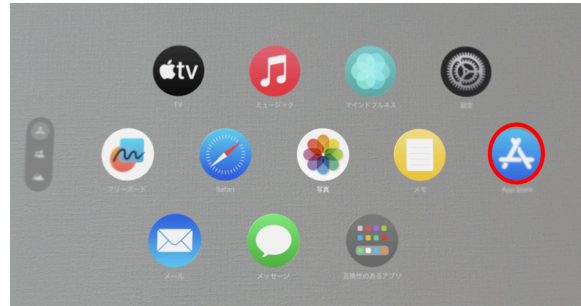

2. App Storeが表示されたら、左側の虫眼鏡を選択し、検索窓を開きます。

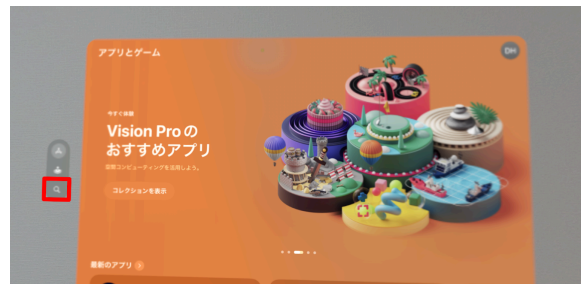

3. 検索窓に「holoeyes」と入力します。候補に「holoeyes md」が表示されるので、選択します。

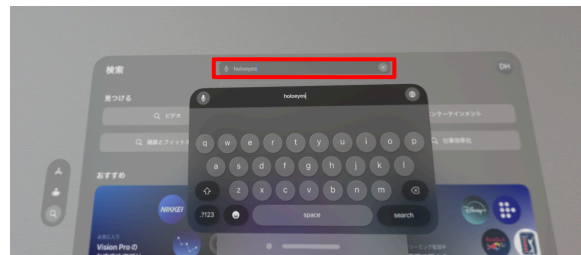

4. 「入手」を選択し、インストールを行います。
5. インストールが完了したら「開く」を選択し、Holoeyes MDを起動します。

## 改訂履歴

日付	内容
2024年 12月 25日	Apple Vision Pro セットアップ手順書新規作成