

HoloLens 2 セットアップ手順書

セットアップ手順	2
初期設定	2
1. Microsoft アカウントの作成	2
2. 本体のセットアップ	2
Holoeyes MD のインストール方法	3
1. QRコードでアプリをインストールする方法	3
2. Microsoft Storeからアプリをインストールする方法	6
改訂履歴	8

注意

HoloLens (第一世代)はHoloeyes MD Version 2.1以降のサポートを終了しています。

セットアップ手順

初期設定

HoloLens 2 のセットアップには、Microsoftアカウントの作成及び Wi-Fi 接続が必要です。

1. Microsoft アカウントの作成


1-1. account.microsoft.com にアクセスし、「アカウントを作成」を選択します。



1-2. 既存のメールアドレスを使用する場合は、メールアドレスを入力し、「次へ」を選択します。

または、新しいメールアドレスを取得する場合は、「新しいメールアドレスを取得」を選択し、「次へ」を選択します。

画面に表示される手順に従って操作し、アカウントを作成します。

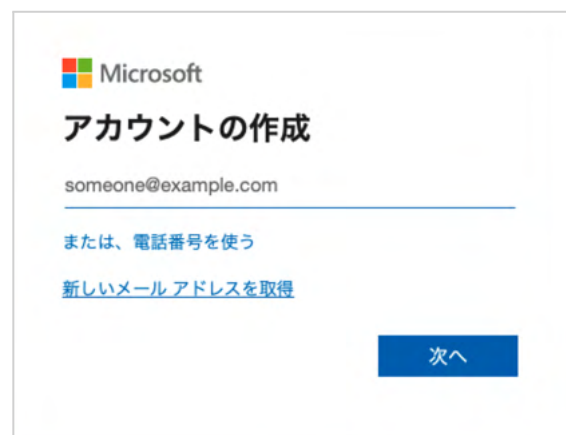

2. 本体のセットアップ

2-1. HoloLens 2 のセットアップを行います。

HoloLens 2 を初めて起動すると、Wi-Fi 接続のガイドが表示されます。画面表示に従って操作し、Wi-Fi に接続します。

※セットアップ後の Wi-Fi 接続手順は、[こちら](#)をご参照ください。

2-2. Wi-Fi 接続後、画面表示に従ってセットアップを完了します。

詳細は[こちら](#)をご参照ください。

Holoeyes MD のインストール方法

インストール方法は 2 通りあります。QRコードでのインストールが最も簡易的です。

1. QRコードでアプリをインストールする方法

1-1. HoloLens 2 の初期設定が完了したら、ヘッドセットを装着した状態で、以下のQRコードを見つめてください。ヘッドセット外側のカメラが自動でQRコードを読み込み、QRコード周囲に緑の枠が表示されます。枠に手を近づけると、真ん中に再生ボタンが表示されるので、指でボタンをクリックします。

※QRコードが小さいと認識されません。本手順書をA4サイズで印刷いただくか、またはPC画面上で大きく表示してください。




※以降の画像は、背景が映らないモードで撮影しています。実際の使用時には、スクリーンが半透明のため、外部が透過して見えます。


1-2. QRコードを読み込むと、右図のWebリンクが表示されます。「開く」を選択します。




1-3. Webブラウザが表示されたら、「ストアアプリを利用する」を選択します。

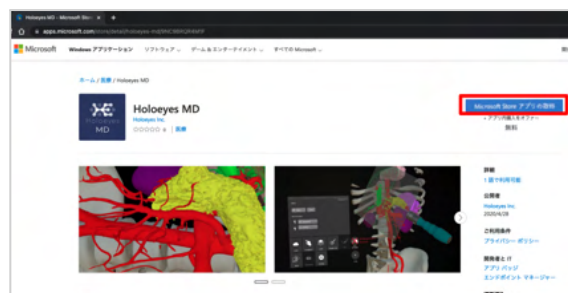

1-4. アプリのページが表示されます。「インストール」ボタンを選択し、インストール完了までそのままお待ちください。

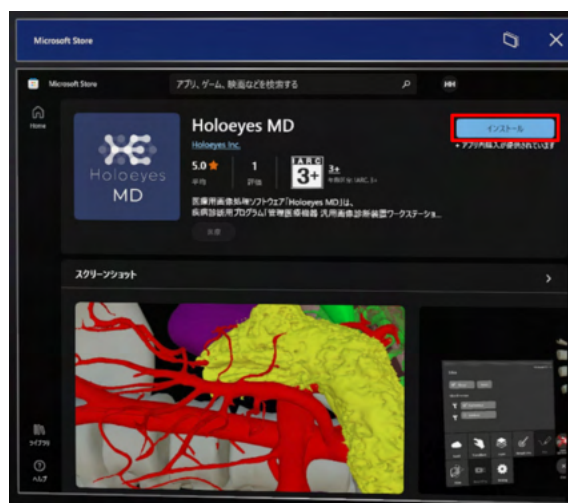


1-5. インストールが完了したら「開く」を選択し、
Holoeyes MDを起動します。

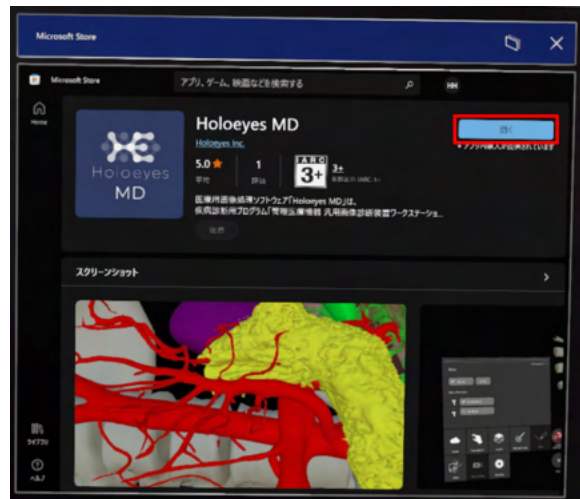


2. Microsoft Storeからアプリをインストールする方法


2-1. HoloLens 2を起動し、スタートメニューから「Microsoft Store」を選択します。

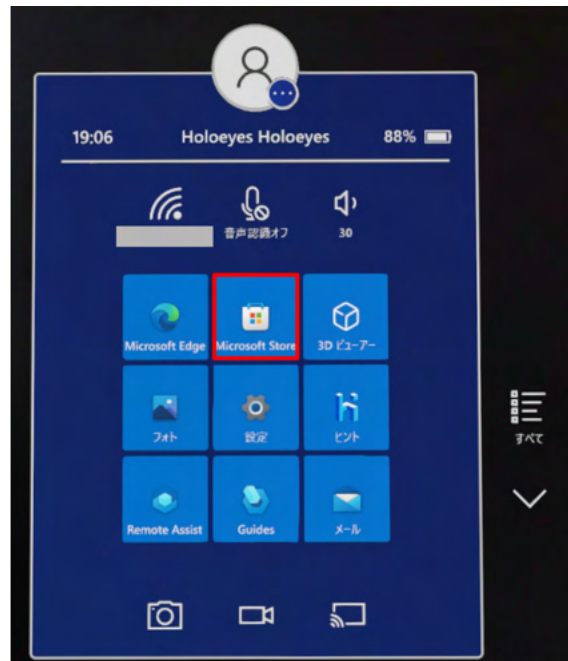


2-2. Microsoft Storeが立ち上がったら、検索窓に「holoeyes」と入力します。

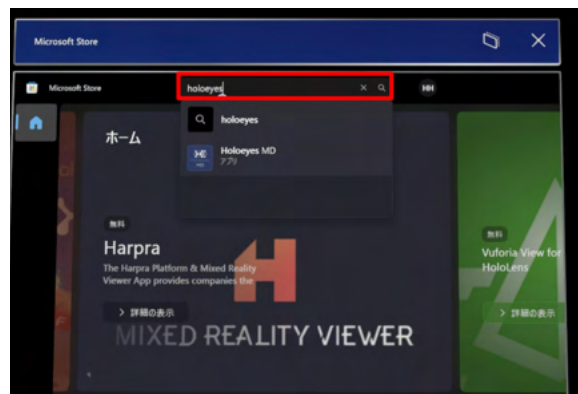


2-3. 検索結果から「Holoeyes MD」を選択し、ページを開きます。

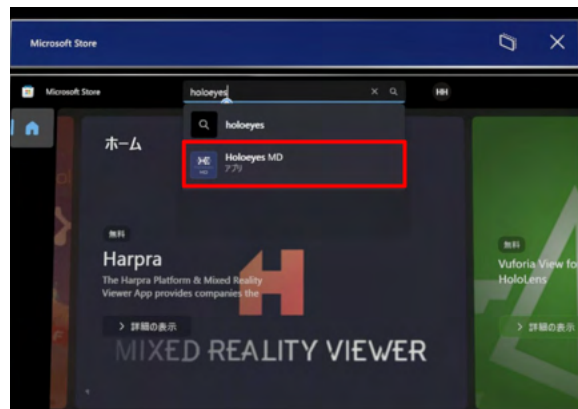

2-4. アプリのページが表示されます。「インストール」ボタンを選択し、インストール完了までそのままお待ちください。

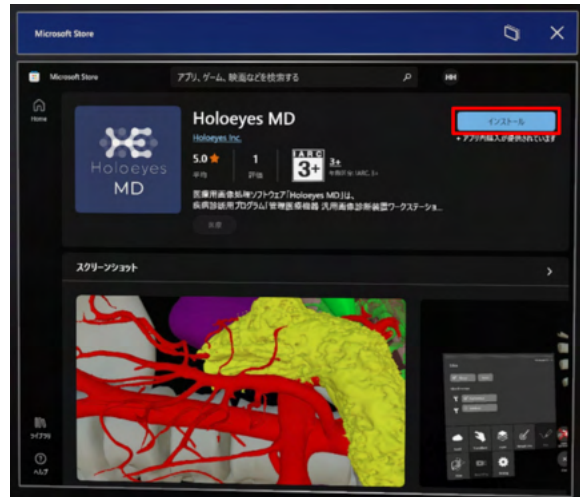

2-5. インストールが完了したら「開く」を選択し、Holoeyes MDを起動します。

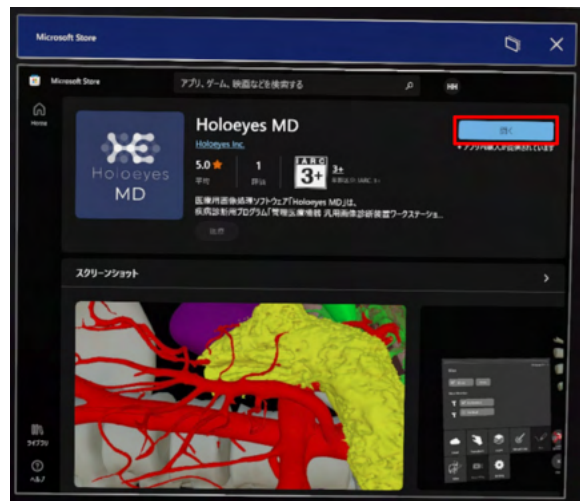

改訂履歴

日付	内容
2022年 8月 31日	HoloLens セットアップ手順書新規作成
2023年 5月 19日	スクリーンショット画面の変更及びVer2.1以降のHoloLens(第一世代)サポート終了に関する追記
2023年 6月 29日	スクリーンショット画面の変更