

Meta Quest セットアップ手順書 (Holoeyes MD)

Meta Quest のセットアップに関して	2
セットアップに必要な準備	3
1. Meta Quest のセットアップ	4
1-1. Metaアカウントの作成 (Meta Quest を初めて利用する場合)	4
① スマートフォンへ Meta Quest アプリをインストールする	4
② Meta Quest アプリで Metaアカウントを作成する	4
②-1. Facebookアカウントで Metaアカウントを作成する	5
②-2. Instagramアカウントで Metaアカウントを作成する	6
②-3. メールアドレスで Metaアカウントを作成する	7
③ Meta Horizonプロフィールを作成する	8
④ Meta Quest とスマートフォンをペアリングし初期セットアップを行う	11
1-2. Metaアカウントの作成 (Facebookアカウントで Meta Quest を利用している場合)	12
① Facebookアカウントでログインする	12
② Metaアカウントを設定する	13
②-1. FacebookでMetaアカウントを設定する	14
②-2. メールアドレスでMetaアカウントを設定する	15
③ デバイスを設定する	16
④ Meta Horizonプロフィールを作成する	17
2. Holoeyes MD アプリケーションのインストール	18
3. Holoeyes アプリケーションの起動	20
改訂履歴	21

Meta Quest のセットアップに関して

2022年8月より、初めてMeta製品を使用する際には、Metaアカウントの作成が必要になりました。以下のフロー図をご確認の上、対象の項目よりセットアップを進めてください。



注意

製品の損傷を予防し、正しい測定結果を得るために重要な事柄です。

- 既にFacebookアカウントでMeta Questを利用している場合は、必ずソフトウェアバージョンを最新にアップデートしてから、Metaアカウントを作成してください。古いバージョンのままMetaアカウントに移行すると、デバイスの初期化が必要になる可能性があります。

参照

製品を効率よく使うためのヒントです。

- Meta Quest は、Oculus Quest の新名称です。
- Holoeyes Edu(ヘッドセット版)をご利用の方は、[Holoeyes Edu 取扱説明書「1. アプリケーションインストール手順書」](#)より「Meta Quest セットアップ手順書(Holoeyes Edu ヘッドセット版)」をご確認ください。

セットアップに必要な準備

- Wi-Fi 環境
- Meta Quest (付属ケーブル含む)
- iPhone (iOS 10以降)または Android™ (5.0 Lollipop以降)スマートフォン
- PC (Windows、macOS、Linuxのいずれか) ※

※ USBホスト(OTG)機能に対応しているAndroid™ スマートフォン及び当該 Android™ スマートフォンの端子と USB TYPE-C 端子を繋ぐケーブルをお持ちの場合には、PCは不要です。お手持ちのスマートフォンが USBホスト機能に対応しているかどうかは、「USB OTG チェッカーの互換性」というアプリをインストールすると確認できます。

1. Meta Quest のセットアップ

1-1. Metaアカウントの作成 (Meta Quest を初めて利用する場合)

① スマートフォンへ Meta Quest アプリをインストールする

スマートフォンに Meta Quest アプリをインストールします。App Store (iPhone) または Google Playストア (Android™) で「Meta」と検索するか、下記のリンクからインストールします。

- App Store (iPhone):
<https://apps.apple.com/us/app/oculus/id1366478176>
- Google Playストア (Android™):
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight&hl=ja&gl=US>

② Meta Quest アプリで Metaアカウントを作成する

スマートフォンの Meta Quest アプリを起動します。

Facebookアカウント(②-1)、Instagramアカウント(②-2)、メールアドレス(②-3)のいずれかでMetaアカウントを作成します。


参照

各種アカウントにスマートフォンでログインしている場合には、アカウント名が表示されます。



②-1. Facebookアカウントで Metaアカウントを作成する

1. 「Facebookでログイン」または「●●としてログイン」を選択します。

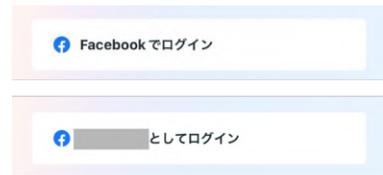

2. 「Facebookでログイン」を選択した場合は、Facebookへログインします。または、「●●としてログイン」を選択した場合は、スマートフォンでログインしている Facebookアカウント情報が表示されます。

「はい。次へ」を選択します。



3. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。



Facebookに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



②-2. Instagramアカウントで Metaアカウントを作成する

1. 「Instagramでログイン」または「●●としてログイン」を選択します。



2. 「Instagramでログイン」を選択した場合は、Instagramへログインします。または、「●●としてログイン」を選択した場合は、スマートフォンでログインしている Instagramアカウント情報が表示されます。

「はい。次へ」を選択します。



3. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。


参照

Instagramに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



②-3. メールアドレスで Metaアカウントを作成する

1. 「メールアドレスで続行」を選択します。

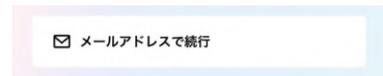

2. メールアドレスを入力し、「次へ」を選択します。

💡 参照


- 既にFacebookアカウントやOculusアカウントで利用しているメールアドレスを入力すると、「このメールアドレスは使用できません」というエラーが生じます。他のメールアドレス、または、既存のアカウントを利用してMetaアカウントを作成してください。



3. 表示されている内容を確認し、「新しいアカウントを作成」を選択後、名前、生年月日の入力が必要になります。順番に入力し、「次へ」を選択します。

💡 参照

- 生年月日は、年齢制限未満でないかどうかの確認に利用されます。Meta Quest 2および3で利用するMetaアカウントの作成は10歳以上、その他すべてのMeta Questヘッドセットは13歳以上が対象です(年齢は国によって異なる場合があります)。

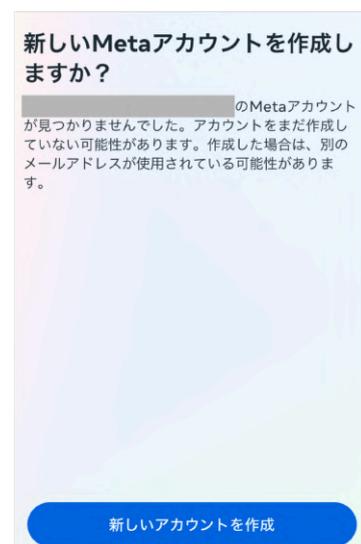

4. 最後に8文字以上のパスワードを設定し、「次へ」を選択します。




パスワードを作成

パスワードは8文字以上の英数字で作成し、他の人が推測できないものにしてください。

パスワード

次へ

5. 記載されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。

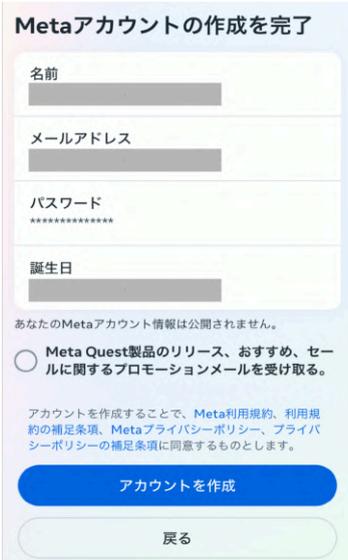

Metaアカウントの作成を完了

名前

メールアドレス

パスワード

誕生日

あなたのMetaアカウント情報は公開されません。

Meta Quest製品のリリース、おすすめ、セールに関するプロモーションメールを受け取る。

アカウントを作成することで、Meta利用規約、利用規約の補足条項、Metaプライバシーポリシー、プライバシーポリシーの補足条項に同意するものとします。

アカウントを作成

戻る

③ Meta Horizonプロフィールを作成する

参照

Meta Horizonプロフィールは、VRをはじめ、ウェブブラウザなどで使うソーシャルプロフィールです。自身固有のユーザーネーム、VRで他の利用者に表示されるHorizonネーム、プロフィール写真、アバターなどを選択できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。

1. 表示される手順に従ってHorizonネーム・ユーザーネームの設定、プロフィール写真の追加(スキップ可)をし、ログインします。

※ログイン後、Meta Quest 暗証番号及び決済情報(スキップ可)の入力を求められる場合があります。

※これ以降の手順(2~3)はスキップ可能な場合があります。



何と呼ばれたいですか？
この情報は公開され、使用中のアプリはこの情報にアクセスできます。Horizonネームはいつでも変更できますが、ユーザーネームを変更できるのは6か月に1度です。

名前
@ユーザーネーム

名前
他の人に表示する名前を入力してください。

ユーザーネーム
固有のユーザーネームを入力してください。

次へ

プロフィール写真を追加しよう
プロフィール写真は公開され、使用中のアプリはこの写真にアクセスできます。これはいつでも変更できます。

スキップ 写真を追加

Meta

M

としてログイン


別のアカウントでログイン

© Meta 2022 · プライバシーポリシー · 利用規約 · 日本語

2. プライバシー設定を行います。「全員にオープン / 友人と家族 / 自分1人」のいずれかを選び、「確認」を選択します。設定内容を確認し、「同意して次に進む」を選択します。




3. 最後にアバターを作成し、プロフィールの設定は完了です。

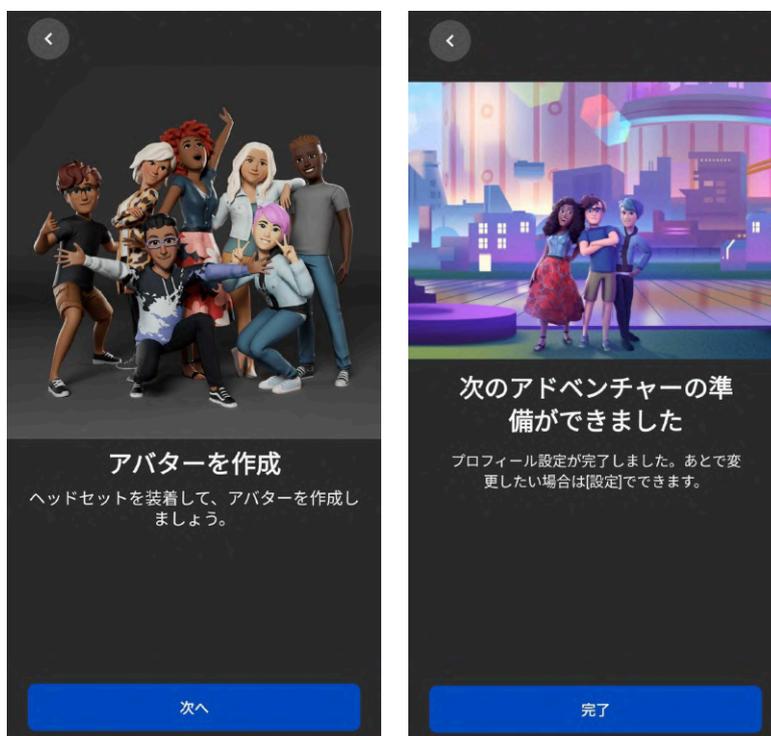

④ Meta Quest とスマートフォンをペアリングし初期セットアップを行う

Meta Quest の電源ボタンを長押しして、Meta Quest を起動します。電源ボタンは、ヘッドセットの右側面にある横長の楕円形のボタンです。

続いて、スマートフォンの Meta Quest アプリに表示される手順に沿って、セットアップを進めます。

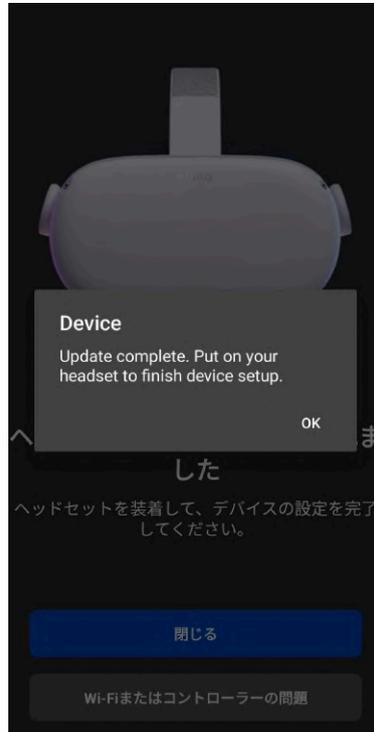

1-2. Metaアカウントの作成 (Facebookアカウントで Meta Quest を利用している場合)

注意

Facebookのテストユーザー(開発者向けアカウント / メールアドレスのドメイン:tfbnw.net)で Meta Quest を利用している場合は、ヘッドセット本体の初期化が必要です。

詳しくは、info@holoeyes.jp までお問い合わせください。

Facebookアカウントでログインする

1. <https://auth.meta.com/websetup/> にアクセスし、「Facebookでログイン」を選択します。



2. メールアドレスとパスワードを入力しログインします。



または、既にFacebookにログインしている場合は、アクセスを許可します。



② Metaアカウントを設定する


Metaアカウントを設定します。表示されているメールアドレスを確認し、「次へ」を選択します。

※このとき表示されているメールアドレスは、Oculusアカウントに登録されているメールアドレスです。



i 注意

Meta Questのソフトウェアバージョンを最新にしていない場合、右図の画面が表示されます。古いバージョンのままMetaアカウントに移行をすると、デバイスの初期化が必要になる可能性があります。**必ず、アップデートを行ってからMetaアカウントを設定してください。**

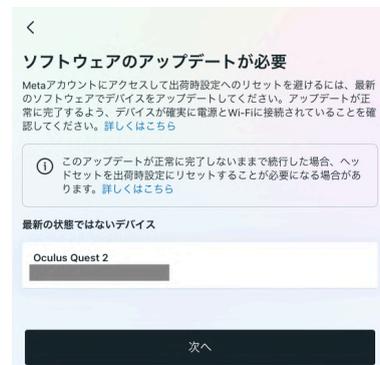

続いて、FacebookでMetaアカウントを設定する(②-1)か、Facebookを使用せずにログインするか(②-2)を選択します。

Facebookアカウントとの連携を解除したい場合は「Facebookを使用せずにログイン」を選択してください。




💡 参照

Facebookアカウントの追加や削除は、[アカウントセンター](#)でいつでも行えます。



②-1. FacebookでMetaアカウントを設定する

1. ログインしているアカウント情報が表示されるので、「次へ」を選択します。

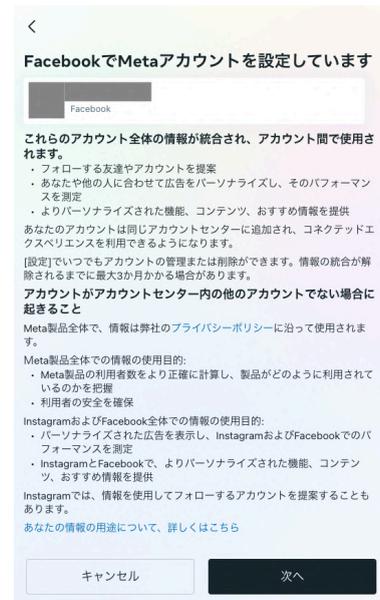

2. 表示されている内容を確認し、「アカウントの設定を完了」を選択します。

参照

Facebookに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



②-2. メールアドレスでMetaアカウントを設定する

1. Metaアカウントのパスワードを作成します。「次へ」を選択すると、Meta アカウントに登録されているメールアドレス宛に6桁の認証コードが送信されます。



2. メールで認証コードを確認し、入力します。



3. パスワードを設定し「次へ」を選択します。



4. 表示されている内容を確認し、「アカウントの設定を完了」を選択します。



③ デバイスを設定する

Metaアカウントの設定が完了すると、ヘッドセットにコードが表示されます。

<https://www.meta.com/device> にアクセスし、コードを入力後、「デバイスを接続」を選択します。

接続後ヘッドセット上で同期が行われ、ヘッドセットの再起動が始まります。

参照

一定時間経過すると、ヘッドセットに表示されているコードは無効になります。その場合は、再度コードを生成してください。



④ Meta Horizonプロフィールを作成する



参照

Meta Horizonプロフィールは、VRをはじめ、ウェブブラウザなどで使うソーシャルプロフィールです。自身固有のユーザーネーム、VRで他の利用者に表示されるHorizonネーム、プロフィール写真、アバターなどを選択できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。

1. Meta Horizonプロフィールとプライバシー設定を確認します。Horizonプロフィールの表示方法や名前の追加など、表示される手順に従って設定します。




2. プライバシー設定の手順は、本手順書「1-1. Metaアカウントの作成 (Meta Quest を初めて利用する場合)」の「[③ Meta Horizonプロフィールを設定する](#)」と同様です。

2. Holoeyes MD アプリケーションのインストール

Meta Quest を Wi-Fi に接続し、ユニバーサルメニューからストアアイコンを選択します(左下図)。検索窓に「holoeyes md」※と入力し、ページ下部「App Lab(1件)」の「入手する」を選択します(右下図)。

※ “holoeyes” と “md” の間にスペース入力が必要です。英字は大文字・小文字どちらでも構いません。

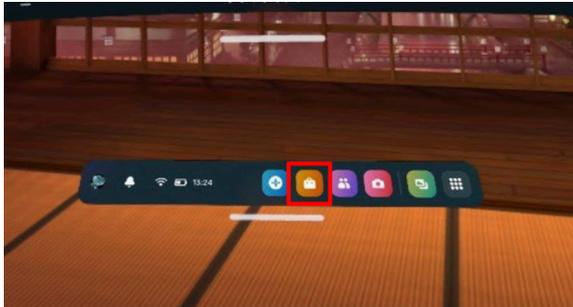

次に「詳細を見る」を選択します(左下図)。App Lab でアプリを入手する際の注意事項が表示されるので、確認の上、「OK」を選択します(右下図)。




次に「入手する」を選択します(左下図)。アプリケーションのインストールが完了すると、「スタート」ボタンが表示されます(右下図)。「スタート」を選択し、アプリケーションを起動します。



注意

Holoeyes MD Version 2.3 以前からご利用いただいている場合

- ヘッドセットにインストールしている既存のアプリをアンインストールしてから、アップデートを実行してください。
- SideQuest 経由でのインストール(Holoeyes MD Version 2.3 までのインストール方法)は、Holoeyes MD Version 2.6 以降は終了しています。SideQuest へアクセスいただいた場合でも、「DOWNLOAD APP (OCULUS)」を選択(左下図)すると、App Lab のインストールページへ遷移します(右下図)。

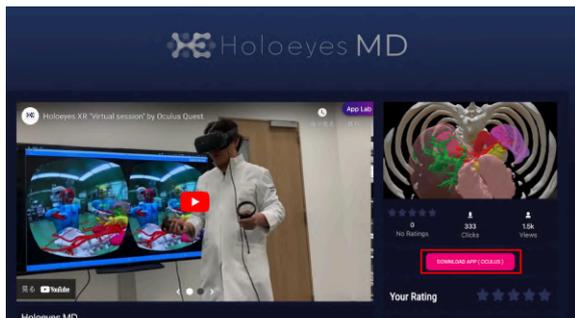


参照

App Lab は Meta Quest 向けの公式ストア(Oculus Store)外アプリ配信システムです。App Lab ポリシーへの準拠と App Lab の審査を経て、Holoeyesアプリケーションを配信をしています。

3. Holoeyes アプリケーションの起動

Meta Quest のユニバーサルメニューからアプリケーションアイコンを選択します(左下図)。

一覧に表示されている「Holoeyes MD」アプリケーションを選択し、起動します(右下図)。

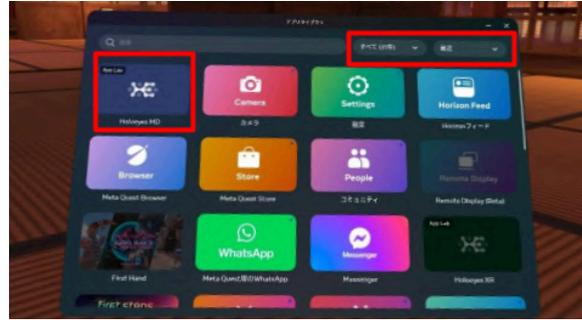

参照

一覧に表示されていない場合は、右上赤枠内のプルダウンリストから「すべて」または「最近」を選択します。

改訂履歴

日付	内容
2022年 8月 31日	Meta Quest セットアップ手順書新規作成
2023年 2月 9日	Meta Quest のOSアップデートに伴う変更の反映(Holoeyes MD アプリケーション表示名の変更)
2023年 5月 19日	アプリケーションインストール手順及びスクリーンショット画面の変更
2024年 2月 7日	アプリケーションインストール手順及びスクリーンショット画面の変更