

Meta Quest セットアップ手順書


Meta Quest のセットアップに関して	2
セットアップに必要な準備	3
1. Meta Quest のセットアップ	4
1-1. Metaアカウントの作成（Meta Quest を初めて利用する場合）	4
① スマートフォンへ Meta Horizon アプリをインストールする	4
② Meta Horizon アプリで Metaアカウントを作成する	4
②-1. Facebookアカウントで Metaアカウントを作成する	5
②-2. Instagramアカウントで Metaアカウントを作成する	6
②-3. メールアドレスで Metaアカウントを作成する	7
③ Meta Horizonプロフィールを作成する	9
④ Meta Quest とスマートフォンをペアリングし初期セットアップを行う	9
1-2. Metaアカウントの作成（Facebookアカウントで Meta Quest を利用している場合）	10
① Facebookアカウントでログインする	10
② Metaアカウントを設定する	11
②-1. FacebookでMetaアカウントを設定する	12
②-2. メールアドレスでMetaアカウントを設定する	13
③ デバイスを設定する	14
④ Meta Horizonプロフィールを作成する	14
2. Holoeyes MD アプリケーションのインストール	15
3. Holoeyes アプリケーションの起動	17
改訂履歴	18

注意

Meta Quset 1 はHoloeyes MD Version 2.9以降のサポートを終了しています。

Meta Quest のセットアップに関して

2022年8月より、初めてMeta製品を使用する際には、Metaアカウントの作成が必要になりました。以下のフロー図をご確認の上、対象の項目よりセットアップを進めてください。

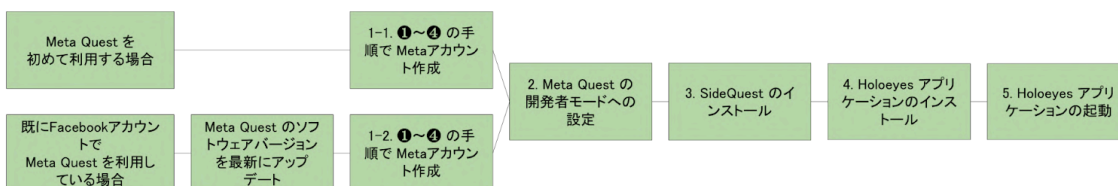

注意

製品の損傷を予防し、正しい測定結果を得るために重要な事柄です。

- 既にFacebookアカウントでMeta Quest を利用している場合は、必ずソフトウェアバージョンを最新にアップデートしてから、Metaアカウントを作成してください。古いバージョンのままMetaアカウントに移行すると、デバイスの初期化が必要になる可能性があります。

参照

製品を効率よく使うためのヒントです。

- Holoeyes Edu(ヘッドセット版) をご利用の方は、[Holoeyes Edu 取扱説明書](#) 「1. アプリケーションインストール手順書」より「Meta Quest セットアップ手順書 (Holoeyes Edu ヘッドセット版)」をご確認ください。

セットアップに必要な準備

- Wi-Fi 環境
- Meta Quest（付属ケーブル含む）
- iPhone (iOS 10以降)または Android™ (5.0 Lollipop以降)スマートフォン
- PC (Windows、macOS、Linuxのいずれか)※

※USBホスト(OTG)機能に対応しているAndroid™ スマートフォン及び当該 Android™ スマートフォンの端子と USB TYPE-C 端子を繋ぐケーブルをお持ちの場合には、PCは不要です。お手持ちのスマートフォンがUSBホスト機能に対応しているかどうかは、「USB OTG チェッカーの互換性」というアプリをインストールすると確認できます。

1. Meta Quest のセットアップ

1-1. Metaアカウントの作成（Meta Quest を初めて利用する場合）

① スマートフォンへ Meta Horizon アプリをインストールする

スマートフォンに Meta Horizon アプリをインストールします。App Store (iPhone) または Google Playストア (Android™) で「Meta」と検索するか、下記のリンクからインストールします。

- App Store (iPhone) :
<https://apps.apple.com/us/app/oculus/id1366478176>
- Google Playストア (Android™) :
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight&hl=ja&gl=US>

② Meta Horizon アプリで Metaアカウントを作成する

スマートフォンの Meta Horizon アプリを起動します。

Facebookアカウント(②-1)、Instagramアカウント(②-2)、メールアドレス(②-3)のいずれかでMetaアカウントを作成します。



💡 参照

各種アカウントにスマートフォンでログインしている場合には、アカウント名が表示されます。



②-1. Facebookアカウントで Metaアカウントを作成する

1. 「Facebookでログイン」または「●●として続行」を選択します。



2. 「Facebookでログイン」を選択した場合は、Facebookへログインします。または、「●●として続行」を選択した場合は、スマートフォンでログインしている Facebookアカウント情報が表示されます。

「次へ」を選択します。

FacebookアカウントでMetaアカウントを作成しますか？



これにより、弊社製品全体で動作する機能に簡単にアクセスできるようになります。

利用者のアカウントを作成するために、弊社は、アカウント全体の情報を統合します

- ・コネクテッドエクスペリエンスを利用者自身で管理できるようにします
- ・利用者と他者向けの広告をパーソナライズし、そのパフォーマンスを測定します
- ・利用者と他者向けのコンテンツやおすめをパーソナライズします
- ・アカウント全体でマッチさせるため、アカウント情報や設定の一部を調整します(いつ

スクロールすると、アカウント全体でのあなたの情報の用途についてチェックできます。

次へ

キャンセル

3. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。

🔦 参照

Facebookに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。

Metaアカウントの作成を完了

名前

メールアドレス

パスワード

Facebookでログイン

誕生日

あなたのMetaアカウント情報は公開されません。

- Meta Quest向けのアプリ、おすめ、セールについて、メールを受け取る。

アカウントを作成することで、Meta利用規約、利用規約の補足条項、Metaプライバシーポリシー、プライバシーポリシーの補足条項に同意するものとします。

アカウントを作成

戻る

4. Meta Horizon プロフィールの設定に進みます。詳細は本手順書「[🔗 Meta Horizonプロフィールを作成する](#)」をご確認ください。

②-2. Instagramアカウントで Metaアカウントを作成する

1. 「Instagramでログイン」または「●●として続行」を選択します。



2. 「Instagramでログイン」を選択した場合は、Instagramへログインします。または、「●●として続行」を選択した場合は、スマートフォンでログインしている Instagramアカウント情報が表示されます。

「次へ」を選択します。



3. 表示されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。

参照

Instagramに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



4. Meta Horizon プロフィールの設定に進みます。詳細は本手順書「[③ Meta Horizonプロフィールを作成する](#)」をご確認ください。

②-3. メールアドレスで Meta アカウントを作成する

1. 「メールアドレスで続行」を選択します。



2. メールアドレスを入力し、「次へ」を選択します。

参照


- 既にFacebookアカウントやOculusアカウントで利用しているメールアドレスを入力すると、「このメールアドレスは使用できません」というエラーが生じます。他のメールアドレス、または、既存のアカウントを利用してMetaアカウントを作成してください。




3. 名前、生年月日の入力求められます。順番に入力し、「次へ」を選択します。

参照

- 生年月日は、年齢制限未満でないかどうかの確認に利用されます。Meta Quest 2、3および3Sで利用するMetaアカウントの作成は10歳以上、その他すべてのMeta Questヘッドセットは13歳以上が対象です(年齢は国によって異なる場合があります)。

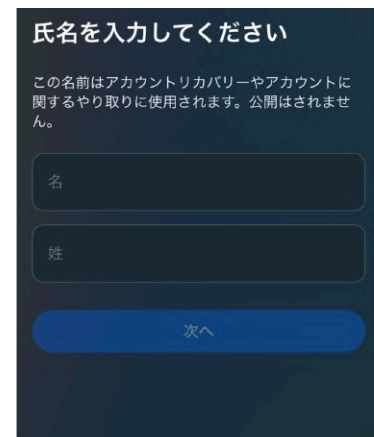

4. 最後に6文字以上のパスワードを設定し、「次へ」を選択します。

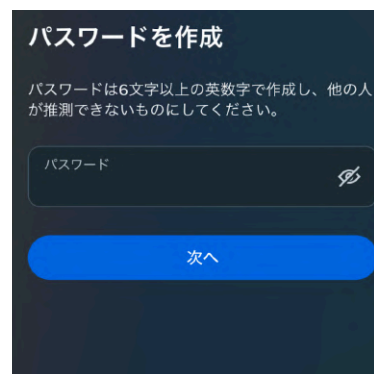

5. 記載されている内容を確認し、「アカウントを作成」を選択します。

The screenshot shows the 'Metaアカウントの作成を完了' (Meta account creation completed) screen. It features a dark blue background with white text. At the top, the title 'Metaアカウントの作成を完了' is displayed. Below it are four input fields: '名前' (Name), 'メールアドレス' (Email address), 'パスワード' (Password) with a strength indicator, and '誕生日' (Birth date). A note states 'あなたのMetaアカウント情報は公開されません。' (Your Meta account information is not public). A radio button is selected for 'Meta Quest向けのアプリ、おすすめ、セールについて、メールを受け取る。' (Receive emails about Meta Quest apps, recommendations, and sales). Below this, a disclaimer mentions 'アカウントを作成することで、Meta利用規約、利用規約の補足条項、Metaプライバシーポリシー、プライバシーポリシーの補足条項に同意するものとします。' (By creating an account, you agree to the Meta Terms of Service, additional terms, Meta Privacy Policy, and additional privacy policy terms). At the bottom, there are two buttons: a large blue 'アカウントを作成' (Create account) button and a smaller white '戻る' (Back) button.

6. 設定したメールアドレスに送信された6桁の認証コードを入力し「次へ」を選択すると、アカウントの認証が完了します。

The screenshot shows the '認証コードを入力' (Enter verification code) screen. It has a dark blue background with white text. The title is '認証コードを入力'. The text reads: 'アカウントを認証するには、[redacted] に送信された6桁のコードを入力してください。メールアドレスを編集' (To verify your account, enter the 6-digit code sent to [redacted]. Edit email address). Below this is an input field labeled '認証コード' (Verification code). A note says: 'notification@email.meta.comからのメールを確認してください。スパムまたは迷惑メールフォルダーに入っている場合もあります。' (Check for email from notification@email.meta.com. It may be in your spam or junk folder). At the bottom, there is a large blue '次へ' (Next) button and a smaller white 'コードが届かなかった場合' (If code did not arrive) link.

④ Meta Horizonプロフィールを作成する


表示される手順に従ってユーザーネームやアバター、プロフィールの公開/非公開を選択し、Meta Horizon プロフィールの設定を完了してください。

参照

Meta Horizonプロフィールは、VRをはじめ、ウェブブラウザなどで使うソーシャルプロフィールです。自身固有のユーザーネーム、VRで他の利用者に表示されるアバターなどを選択できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。

⑤ Meta Quest とスマートフォンをペアリングし初期セットアップを行う

Meta Quest の電源ボタンを長押しして、Meta Quest を起動します。続いて、スマートフォンの Meta Horizon アプリに表示される手順に従って、セットアップを進めます。

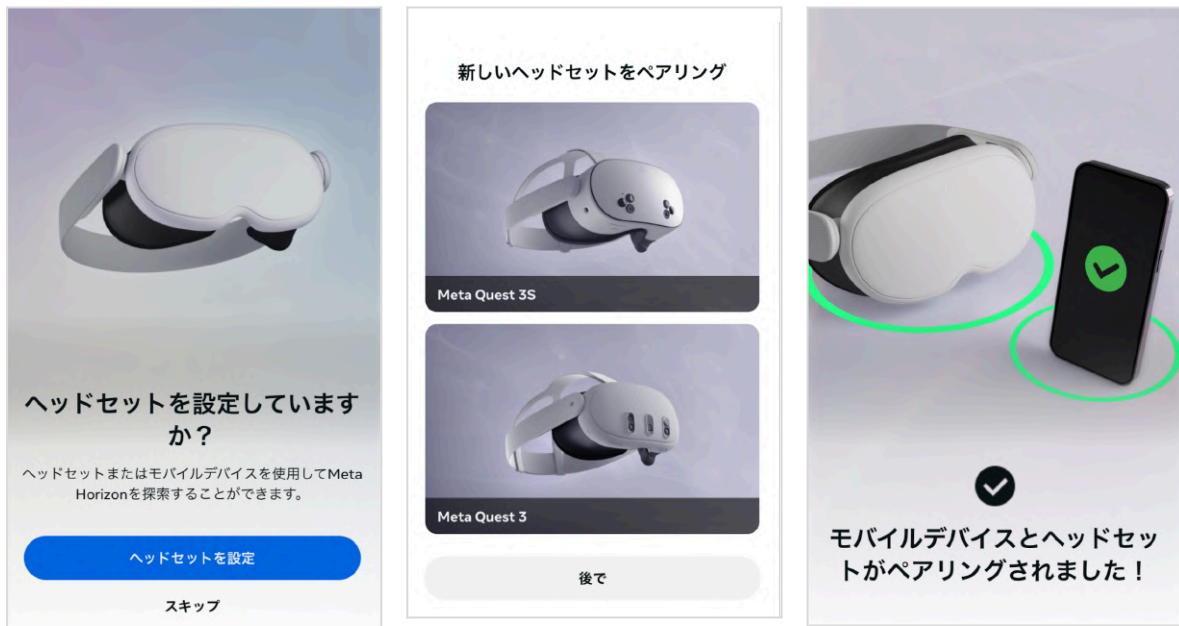


1-2. Metaアカウントの作成（Facebookアカウントで Meta Quest を利用している場合）

① Facebookアカウントでログインする

1. <https://auth.meta.com/websetup/> にアクセスし、「Facebookでログイン」を選択します。



2. メールアドレスとパスワードを入力しログインします。

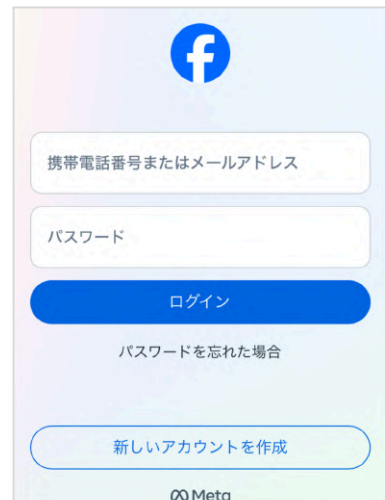


または、既にFacebookにログインしている場合は、アクセスを許可します。



② Metaアカウントを設定する


Metaアカウントを設定します。表示されているメールアドレスを確認し、「次へ」を選択します。

※このとき表示されているメールアドレスは、Oculusアカウントに登録されているメールアドレスです。

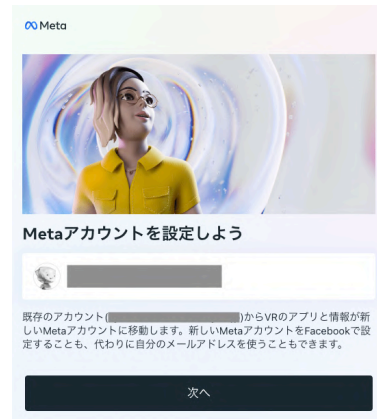

① 注意

Meta Questのソフトウェアバージョンを最新にしていな場合、右図の画面が表示されます。古いバージョンのままMetaアカウントに移行をすると、デバイスの初期化が必要になる可能性があります。**必ず**、アップデートを行ってからMetaアカウントを設定してください。

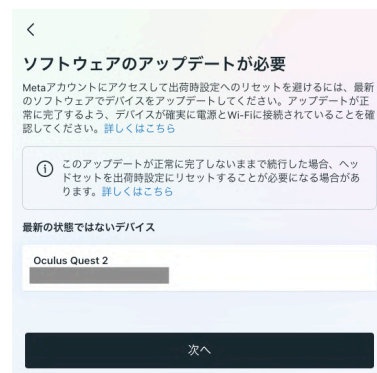

続いて、FacebookでMetaアカウントを設定する(②-1)か、Facebookを使用せずにログインするか(②-2)を選択します。Facebookアカウントとの連携を解除したい場合は「Facebookを使用せずにログイン」を選択してください。




💡 参照

Facebookアカウントの追加や削除は、[アカウントセンター](#)で行っても行えます。



🔗-1. FacebookでMetaアカウントを設定する

1. ログインしているアカウント情報が表示されるので、「次へ」を選択します。

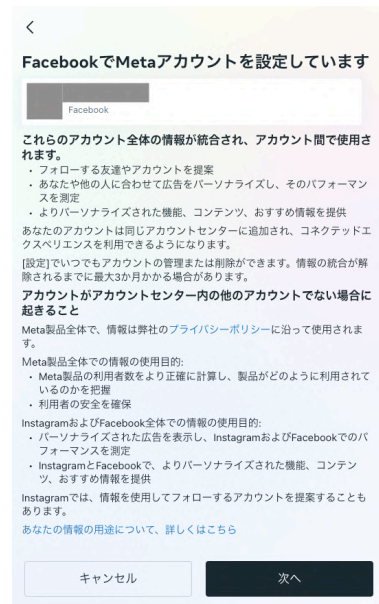

2. 表示されている内容を確認し、「アカウントの設定を完了」を選択します。

💡 参照

Facebookに登録されていない項目がある場合には、情報の入力を求められます。右図の画面になるまで、順番に情報を入力してください。



②-2. メールアドレスでMetaアカウントを設定する

1. Metaアカウントのパスワードを作成します。「次へ」を選択すると、Meta アカウントに登録されているメールアドレス宛に6桁の認証コードが送信されます。



2. メールで認証コードを確認し、入力します。



3. パスワードを設定し「次へ」を選択します。



4. 表示されている内容を確認し、「アカウントの設定を完了」を選択します。



④ デバイスを設定する

Metaアカウントの設定が完了すると、ヘッドセットにコードが表示されます。

<https://www.meta.com/device> にアクセスし、コードを入力後、「デバイスを接続」を選択します。

接続後ヘッドセット上で同期が行われ、ヘッドセットの再起動が始まります。

参照

一定時間経過すると、ヘッドセットに表示されているコードは無効になります。その場合は、再度コードを生成してください。



⑤ Meta Horizonプロフィールを作成する

表示される手順に従ってユーザーネームやアバター、プロフィールの公開/非公開を選択し、Meta Horizon プロフィールを完了してください。


参照

Meta Horizonプロフィールは、VRをはじめ、ウェブブラウザなどで使うソーシャルプロフィールです。自身固有のユーザーネーム、VRで他の利用者に表示されるアバターなどを選択できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。できます。Meta Horizonプロフィールは、Metaアカウントごとに1つ作成できます。


2. Holoeyes MD アプリケーションのインストール

Meta Quest を Wi-Fi に接続し、ユニバーサルメニューからストアアイコンを選択します(左下図)。検索窓に「holoeyes md」※と入力し、アプリの「入手する」を選択します(右下図)。

※「holoeyes」と「md」の間にスペース入力が必要です。英字は大文字・小文字どちらでも構いません。

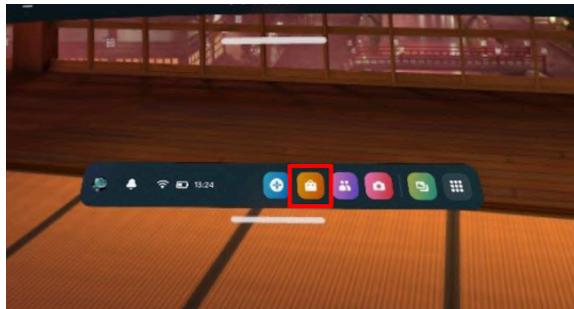



次に説明画面の「入手する」を選択します(左下図)。アプリケーションのインストールが完了すると、「スタート」ボタンが表示されます(右下図)。「スタート」を選択し、アプリケーションを起動します。

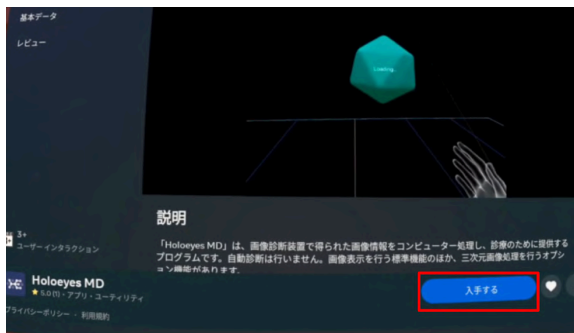

i 注意



Holoeyes MD Version 2.3 以前からご利用いただいている場合

- ヘッドセットにインストールしている既存のアプリをアンインストールしてから、アップデートを実行してください。
- SideQuest 経由でのインストール（Holoeyes MD Version 2.3 までのインストール方法）は、Holoeyes MD Version 2.6 以降は終了しています。SideQuest へアクセスいただいた場合でも、「DOWNLOAD OCULUS」を選択(左下図)すると、Meta Horizon Store のインストールページへ遷移します(右下図)。

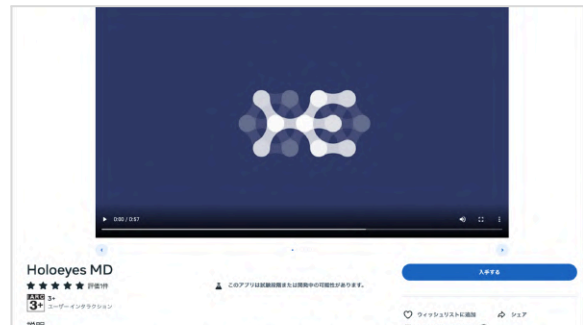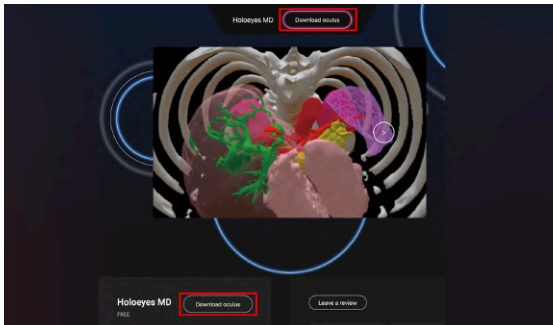

3. Holoeyes アプリケーションの起動

Meta Quest のユニバーサルメニューからアプリケーションアイコンを選択します(左下図)。一覧に表示されている「Holoeyes MD」アプリケーションを選択し、起動します(右下図)。

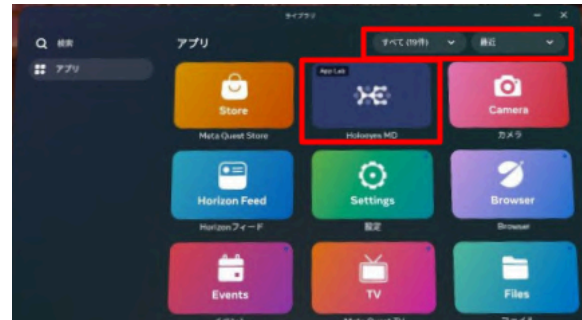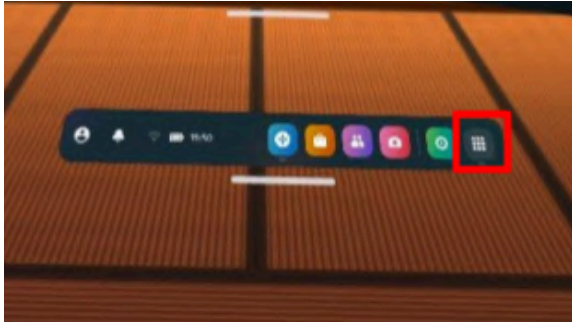

参照

一覧に表示されていない場合は、右上赤枠内のプルダウンリストから「すべて」または「最近」を選択します。

改訂履歴

日付	内容
2022年 8月 31日	Meta Quest セットアップ手順書新規作成
2023年 2月 9日	Meta Quest のOSアップデートに伴う変更の反映 (Holoeyes MD アプリケーション表示名の変更)
2023年 5月 19日	アプリケーションインストール手順及びスクリーンショット画面の変更
2024年 2月 7日	アプリケーションインストール手順及びスクリーンショット画面の変更
2024年10月 2日	アプリケーションインストール手順及びスクリーンショット画面の変更、Ver2.9以降のMeta Quest 1 サポート終了に関する追記
2024年10月 30日	Meta Quest セットアップ手順及びスクリーンショット画面の変更